

ПОДСТАВКА
ПП-01(с одной ступенью) «ЭЛЕКТРА»
для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок,
массажных кушеток, гинекологических кресел
Паспорт
МПЭЛ.942819.012-01 П

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка ПП-01(с одной ступенью) «ЭЛЕКТРА» для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок, массажных кушеток, гинекологических кресел и т.п. предназначена для использования в больницах, госпиталях, медицинских центрах, домах инвалидов и престарелых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПП-01(с одной ступенью) «Электра»	455x305x200 *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	4,5

Подставка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не более 150 кг.

Подставка должна быть устойчива на горизонтальной плоскости. Средний срок службы подставки должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

Подставка представляет собой каркас, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку.

На каркасе располагается одна ступень из нержавеющей стали.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте подставку и очистите ее от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию подставки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Подставка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готова к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр подставки на отсутствие внешних повреждений

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Неплотное прилегание ступени к корпусу	Ослабли винты, соединяющие ступень с каркасом	Подтянуть винты

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие подставки ПП-01-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-012-39548518-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока подставки ПП-01(с одной ступенью) «ЭЛЕКТРА» для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок, массажных кушеток, гинекологических кресел ТУ 9452-012-39548518-2004

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретена _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введена в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принята на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца