

Столик инструментальный манипуляционный из нержавеющей стали передвижной с двумя полками и двумя ящиками СИя 4 3-01 (2М-2)-«Электра»

**Паспорт
МПЭЛ.942819.003-38П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный манипуляционный из нержавеющей стали передвижной с двумя полками и двумя ящиками СИя4 3-01 (2М-2) -«Электра»	830x505x910* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	14

Столик инструментальный манипуляционный с двумя полками и двумя ящиками СИя4 3-01 (2М-2) -«Электра» является модификацией базовой модели столика СИя4 3-01-«Электра». Размер полки - 755x395x16 мм, полезный объем ящика 335x315x60 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 16 кг. При этом нагрузка на полку составляет 5 кг, на ящик – 3 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесах диаметром 75 мм, на котором располагаются две полки и два ящика. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИя4 3-01 (2М-2) -«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИя4 3-01 (2М-2) -«Электра» ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска: 2024г.

Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать

руководителя

ремонтного предприятия

подпись и печать

руководителя

учреждения владельца