

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1. Упоры для плеч (далее — упор) предназначены для фиксации туловища пациента при наклонном положении панели стола во время проведения операций и процедур на столах операционных универсальных СОУ - «МСК», изготовленных по ТУ 9452-027-52962725-2008.

1.2. Упор для плеч изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1. Основные параметры и размеры упора указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-629/12
1. Габаритные размеры одного упора, мм, ±5 мм	390x300x90
2. Габаритные размеры подушки, мм	130x100x56
3. Масса комплекта (две шт.), кг, не более:	5,5

2.2. Характеристики:

2.2.1. Поверхность упора устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1. Комплект поставки упора для плеч соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Стойка	2
2	Держатель	2
3	Подушка	2
4	Резьбовой фиксатор	4
5	Универсальный зажим	2
6	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

4.1. Все металлические детали упора изготовлены из нержавеющей стали.

4.2. Подушка изготовлена из ДСП толщиной 16 мм, поролоновой прослойки и облицована винилскожей. Положение подушки относительно держателя регулируется резьбовым фиксатором.

4.3. Упор имеет универсальный зажим для крепления к боковой рейке операционного стола и позволяющий регулировать положение упора по высоте, вдоль панели стола и вокруг вертикальной оси.

4.4. Резьбовой фиксатор, расположенный на стойке, позволяет регулировать положение упора в направлении поперечном панели стола.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. К сборке и эксплуатации упора для плеч допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

6.1. После транспортирования упора в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать упор и проверить целостность деталей.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:

- установить универсальный зажим на рейку операционного стола и зафиксировать;
- вставить стойку в зажим и зафиксировать на необходимой высоте;
- установить необходимый вылет держателя с подушкой и зафиксировать.
- установить необходимое положение подушки и зафиксировать.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1. Упор для плеч не требует специального технического обслуживания.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

9.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

9.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Упоры для плеч(пара) МСК-629/12 \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Соответствуют ТУ 9452-027-52962725-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

М. П.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

Дата, подпись, штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

