

Подставка из нержавеющей стали с захватами для размещения биксов, с педалью и устройством для открывания и удерживания крышки биксов, передвижная ПБ-01-«Электра»

**Паспорт
МПЭЛ.942819.001 П**

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка из нержавеющей стали с захватами для размещения биксов, с педалью и устройством для открывания и удерживания крышки биксов, передвижная ПБ-01-«Электра» предназначена для размещения на ней биксов. Подставка выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Подставка для размещения биксов передвижная ПБ-01-«Электра»	450x500x955...1220* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	4

Подставка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 15 кг. Средний срок службы подставки должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Подставка представляет собой каркас, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе устанавливается бикс, с помощью втулки, регулируется угол подъема крышки бикса. Поворотные колеса диаметром 50 мм обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте подставку и очистите ее от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию подставки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Подставка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готова к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр подставки на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения подставки	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие подставки ПБ-01-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-001-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставки из нержавеющей стали с захватами для размещения биксов, с педалью и устройством для открывания и удерживания крышки биксов, передвижная ПБ-01-«Электра» ТУ 9452-001-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретена _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введена в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принята на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца