

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба с выдвижными ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06,
заводской номер _____, ТУ ВУ 800017554.036-2006

Приобретена _____

_____ дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____

_____ дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Т02 Т03 Т04 Т05 Т06

ТУ ВУ 800017554.036-2006

Паспорт


БИПЯ.324422.036 Т02 ПС

БИПЯ.324422.036 Т03 ПС

БИПЯ.324422.036 Т04 ПС

БИПЯ.324422.036 Т05 ПС

БИПЯ.324422.036 Т06 ПС

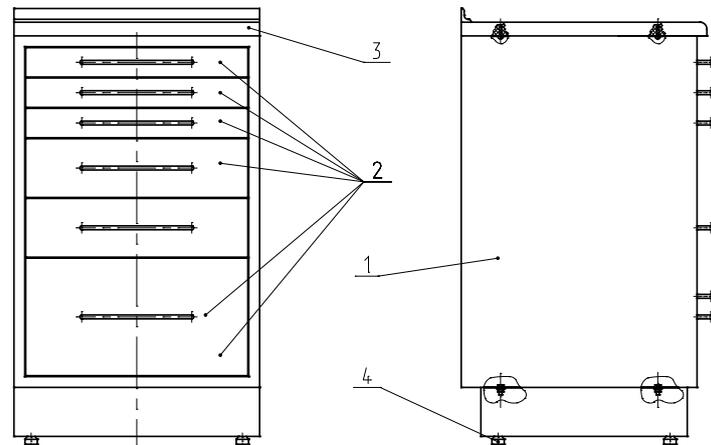

1. Корпус
2. Выдвижные ящики (количество ящиков определяется моделью тумбы, например тумба Т02 – количество ящиков:2 и т.д.)
3. Столешница
4. Опоры

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Рисунок

1.1 Тумба с выдвигаемыми ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	500
ширина.....	515
высота	860

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина.....	500
ширина.....	480

2.3 Размеры столешницы, мм

длина.....	500
ширина.....	500

2.4 Масса Т02/Т03/Т04/ Т05/Т06, кг, не более.....

40/43/46/48/49

5±0,5

2.5 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг.....

5±0,5

2.6 Допускаемая нагрузка на ящик, кг.....

5

2.7 Срок службы, лет, не менее.....

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба	1 шт.
паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с выдвигаемыми ящиками 2, столешницы 3 и опор 4. Корпус тумбы изготовлен из тонколистовой стали, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг толщиной 28 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В процессе эксплуатации периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекокс, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с выдвигаемыми ящиками – Т02,Т03, Т04, Т05, Т06 , заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 и признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска 06.2021г. м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с выдвигаемыми ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации. Дата упаковки 06.2021г.

Упаковку произвел _____ м.п.