

**СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
СВ4 (шариковые направляющие)**

**ТУ ВУ 800017554.036-2006**

Паспорт

БИПЯ.324422.036.СВ4 ПС

**10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.036-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем.

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н., д. Пинковичи, ул. Полевая ,316, к.4.

**11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Столик врача стоматолога СВ4 заводской № \_\_\_\_\_  
ТУ ВУ 800017554.036-2006


Приобретен \_\_\_\_\_  
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием  
\_\_\_\_\_ города \_\_\_\_\_

Подпись и печать руководителя  
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя  
учреждения - владельца

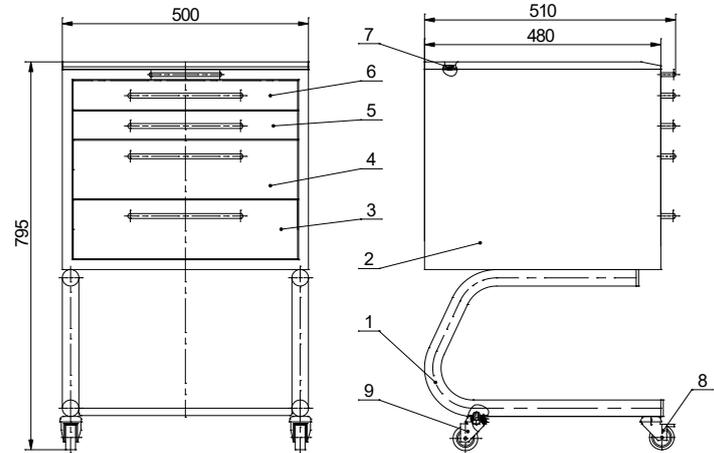

- 1. Стойка
- 2. Каркас
- 3,4,5,6 Ящики выдвижные

- 7. Полка стеклянная
- 8. Колеса с тормозом
- 9. Колеса без тормоза

Рисунок

+

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик врача стоматолога СВ4 (далее – столик) предназначен для размещения медикаментов, инструментов и материалов.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....	510
ширина.....	500
высота.....	795
2.2 Масса, кг, не более.....	39
2.3 Номинальная нагрузка на ящик (далее - нагрузка), кг.....	5±0,5
2.4 Номинальная нагрузка на столешницу (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.5 Усилие для перемещения столика с нагрузкой, Н, не более .....	100
2.6 Срок службы, лет, не менее.....	5

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- столик .....	1 шт.
- полка стеклянная .....	1 шт.
- паспорт .....	1 шт.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из стойки 1, каркаса 2, четырех выдвижных ящиков 3, 4, 5, 6, стеклянной полки 7, двух опорных колес 9 и двух опорных колес с тормозом 8.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Распакуйте стеклянную полку.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Положите стеклянную полку 7 на каркас 2.

4.6 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата).

## 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не переезжать через пороги и другие препятствия.

## 6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Таблица

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекося, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик врача стоматолога СВ4, заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 07.2021г.

м.п.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик врача стоматолога СВ4, заводской № \_\_\_\_\_ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

1. Дата упаковки 07.2021г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ Подпись