

## 12. Гарантийные обязательства

- 12.1 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 12.2 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений изделия по вине потребителя.
- Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты производственного характера, осуществляется при предъявлении гарантийного талона и упаковочных этикеток.
- За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- 12.3 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 или по факсу (831) 216-20-51 или по электронной почте [otk@tdask.ru](mailto:otk@tdask.ru).

## 13. Сведения о производителе, свидетельство о приемке

Стол-тумба лабораторный СТ.02.02 изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2011 и признан годным для эксплуатации.

(штамп ОТК)

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

м.п.

Упаковщик:

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**  
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород,  
ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.  
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д.60.  
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18  
E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 мес. с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты производства.

Наименование изделия	СТ.02.02 Стандарт (ПК)	
Дата ввода в эксплуатацию		
<b>Внимание! Действительным является только заполненный Гарантийный талон, заверенный печатью организа-</b>		М.П.

ции, вводящей изделие в эксплуатацию.	
---------------------------------------	--

ОБРАЗЕЦ

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий "КДЛ"

Стол лабораторный, серия Стандарт, СТ.02.02, 1000x600x850 (ПК)



ТУ 9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

ОБРАЗЕЦ

## 1. Введение

1.1 Настоящий паспорт является совмещённым документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

1.2 Документ предназначен для ознакомления с медицинским изделием «Стол-тумба лабораторный» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортировки, хранения и т.д.).

## 2. Наименование и основные технические характеристики

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
СТ.02.02 Стандарт (ПК)	Стол-тумба лабораторный. Отделение с дверью и одной полкой; отделение с 4-мя ящиками.	1000	600	850	60

2.1 Стол-тумба изготовлен из алюминиевого профиля и ЛДСП панелей, устанавливается на регулируемые опоры.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий. Изображения в паспорте, иллюстрирующие внешний вид изделия и порядок его сборки – схематические и могут отличаться от реального вида.**

## 3. Назначение

3.1 Стол предназначен для оснащения диагностических лабораторий медицинских учреждений. Используется для хранения и размещения на его рабочей поверхности и внутри него - химических реактивов, лабораторной посуды, документов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря, аппаратуры, материалов для исследований, и манипуляций с ними.

## 4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Стол-тумба в разобранном виде с комплектом фурнитуры	1
Паспорт	1

## 10. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

- 10.1 Транспортировка должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковок в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 10.2 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 10.3 Хранение должно производиться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.
- 10.4 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений в соответствии со своим функциональным назначением.
- 10.5 Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°C до +40°C при относительной влажности 45-70%.

**Рекомендуется:** размещать предметы внутри мебели, обеспечивая равномерное распределение нагрузки (по принципу тяжёлые – ближе к краям, лёгкие – по центру), нагружая многоярусные шкафы больше в нижних секциях для лучшей устойчивости, нагрузка на полку ЛДСП не более 5кг; во избежание перекосов дверей и ящиков держать их закрытыми; регулярно проверять прочность резьбовых соединений (в частности замков) и при необходимости подтягивать их; удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги, растворителей и химически активных веществ; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие солнечных лучей; перемещение мебели без последующей регулировки её положения относительно пола.

## 11. Порядок осуществления утилизации

- 11.1 Изделие после окончания использования утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

ОБРАЗЕЦ

## **7. Маркировка и упаковка**

- 7.1 Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011.
- 7.2 На изделии присутствует этикетка с указанием: наименования и товарного знака предприятия-изготовителя; обозначения ТУ; обозначения (артикула) изделия; месяца и года выпуска; серийного номера изделия.
- 7.3 Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011. Для транспортирования изделие упаковывается в короб из гофрокартона.
- 7.4 На транспортную тару нанесена маркировка, выполненная на бумажном ярлыке в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, содержащая следующую информацию: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; обозначение ТУ, наименование и обозначение (артикул) изделия; месяц и год выпуска; манипуляционные знаки указывающие на способ обращения с упакованным грузом; количество грузовых мест и порядковый номер места; масса брутто грузового места в килограммах; габаритные размеры грузового места в миллиметрах.

## **8. Подготовка к работе**

- 8.1 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделие в транспортной таре должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.
- 8.2 Распакуйте компоненты изделия, освободив его от упаковочного материала.
- 8.3 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

## **9. Меры предосторожности (противопоказания)**

- 9.1 К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.
- 9.2 Запрещается использование изделия с механическими повреждениями.
- 9.3 Недопустимо использовать изделие не по назначению.



9.4 Побочные действия при применении по назначению не выявлены.


ОБРАЗЕЦ

## 5. Сборка и техническое обслуживание

- 5.1 Распаковав стол, внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – отвёртки, молоток, рулетку или линейку, гаечный ключ 12мм для регулировки опор, шуруповёрт.
- 5.2 В вертикальные стойки боковых стенок и средней стенки [1,2,3] забейте заглушки (13,14) и вкрутите в них регулировочные опоры (15). При помощи рулетки разметьте вертикальные стойки для установки полкодержателей (16).  
Порядок установки - головку закладного винта ввести в паз профиля, поворотом полкодержателя зафиксировать его на стойке; шестигранным ключом затянуть соединение (усилие не должно быть чрезмерным, чтобы не деформировать стенки алюминия профиля).  
На средней стенке [3] и боковой правой стенке [2] шурупами 3.5x16 (25) закрепите направляющие выдвижных ящиков (21), таким образом, чтобы направл. выступала на 10мм относительно перед. края внутренней панели. На двери [7] шурупами (22) закрепите дверные петли (19), установите ручку (23).
- 5.3 При помощи ригелей [12] соедините верт. стенки, предварительно установив в пазы верт. стоек и ригелей задние стенки [4].  
Для соединения ригеля со стойками – завести головки замков в пазы стоек; повернуть ригель с замками на 90° и ,выровняв его по высоте, завернуть крепёжные винты замков.
- 5.4 Установите горизонтальную стенку [6] и зафиксируйте её шурупами с прессшайбой (17). Установите дверь [7]. Для этого потребуется ослабить крепление ригеля тумбы [12] (с установленной закладной), сдвинуть его в пазах вертикал. стоек, установить дверь и снова затянуть соединение. Шурупами (22) закрепите к горизонт. нижней стенке [6]. Крышку [5] установите при помощи металлических уголков (18), закрепив их саморезами с прессшайбой (17).
- 5.5 Установите стол на предназначенное для него место. Регулировкой опор обеспечьте устойчивое без перекосов положение стола. Отрегулируйте зазоры двери - ослабляя и затягивая после сдвига винты установочных площадок поворотных петель (19).
- 5.6 Сборка выдвижных ящиков. Схема сборки ящиков показана на рис.1. Шурупами 4x16 соедините заднюю стенку, днище ящика и его фасад с металлическими боковинами направляющего механизма. На фасад ящика установите ручку. Установите в стол-тумбу собранные ящики. При необходимости отрегулируйте зазоры винтами крепёжного фасадного элемента метабоксов.
- 5.7 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено: отсутствие механических повреждений влияющих на работоспособность изделия, наличие и прочность крепления, отсутствие слабо закрепленных элементов.

## 6. Комплекточная ведомость на детали и фурнитуру



№	Наименование	Кол.
1	Ст. бок. лев. (в сборе)	1
2	Ст. бок. прав. (в сборе)	1
3	Ст. сред. (в сборе)	1
4	Ст. верт. зад.	2
5	Крышка	1
6	Ст. горизонт. нижн.	1
7	Дверь	1
8	Полка	1
9	Ст. ящ. зад.	4
10	Дно ящ.	4
11	Фасад ящика	4

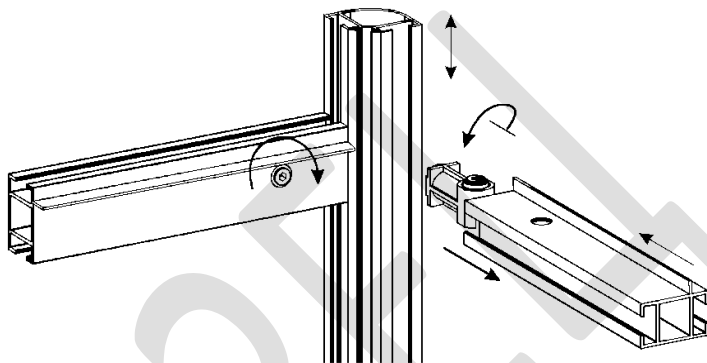

№	Наименование	Кол.
12	Ригель	8

№	Наименование	Кол.
13	Заглушка резьбовая	4
14	Заглушка резьбовая (для средней стойки)	2
15	Опора регулировочная	6
16	Полкодержатель	4
17	Саморез с прессшайбой 4.2x14	28
18	Уголок металлический	6
19	Петля вкладная мебельная (для двери из ЛДСП)	2
20	Магнит с подкладкой	1

21	Направляющий механизм h86 (метабокс)	4
22	Шуруп 4x16	64
23	Ручка (с крепежными винтами)	5
24	Ключ шестигранный	1
25	Шуруп цинк 3.5 x 16	18
26	Саморез потай цинк. 3.5x20	4
27	Саморез потай цинк. 3.5x30	2

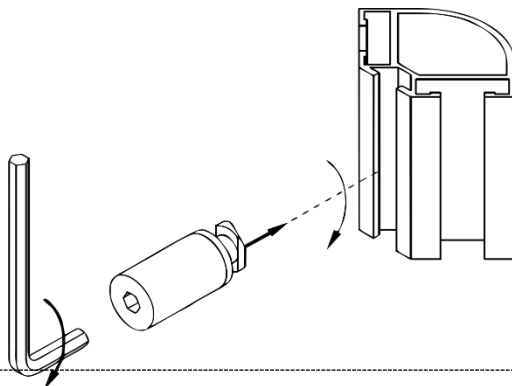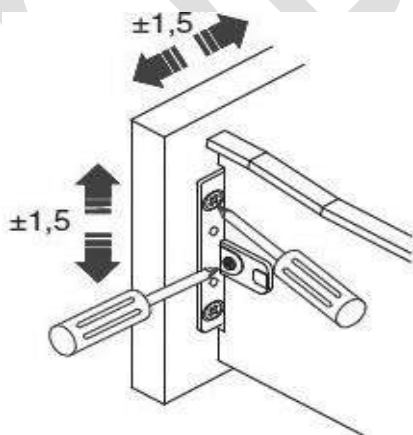

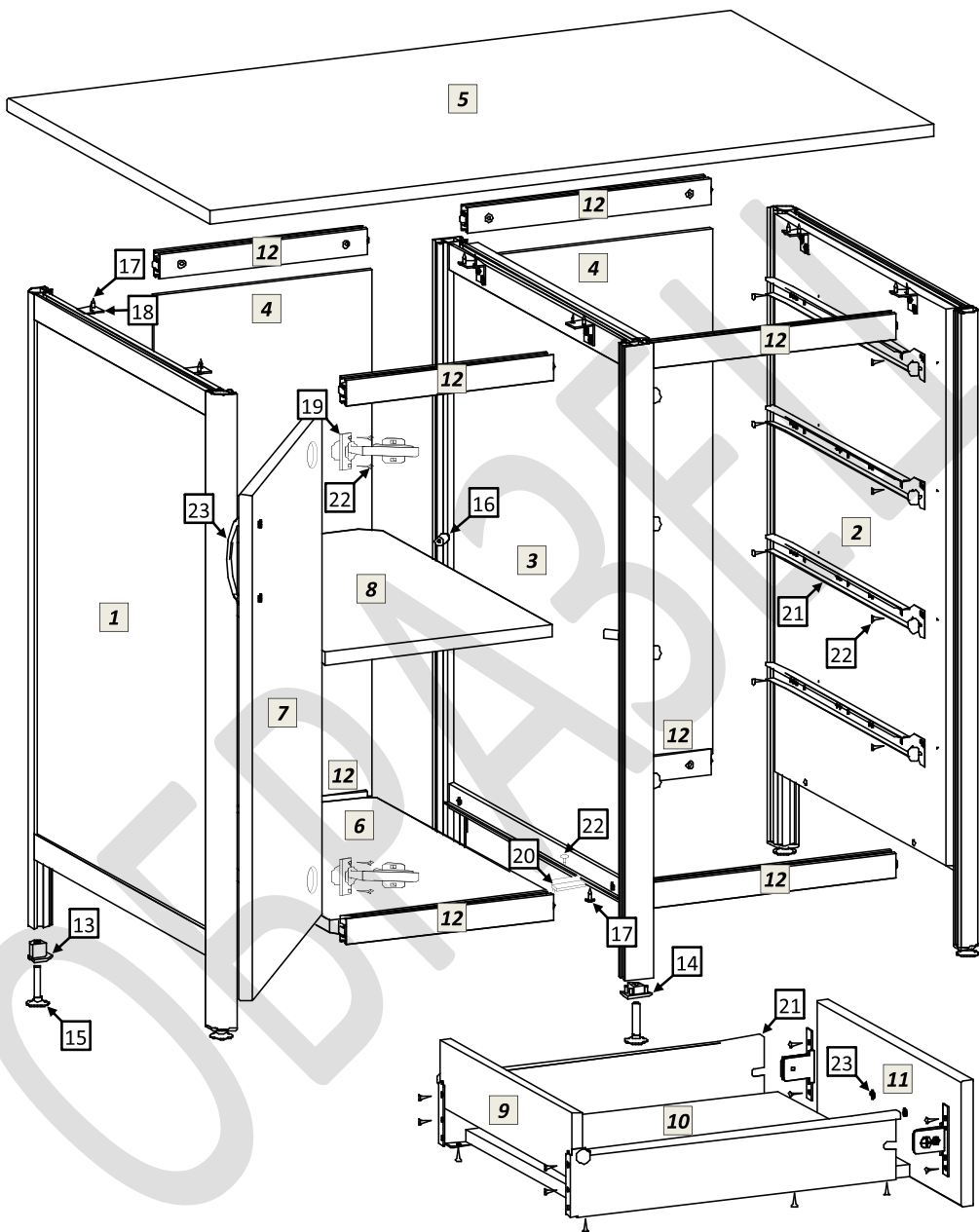


рис.1