

**Столик инструментальный из нержавеющей стали с двумя полками и одним ящиком передвижной  
СИЯ 2-01 (2-1)-«Электра»**

**Паспорт  
МПЭЛ.942819.003-31П**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля. Столик выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный из нержавеющей стали с двумя полками одним ящиком передвижной <b>СИЯ 2-01 (2-1)-«Электра»</b>	635x495x880* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	10

Столик **СИЯ 2-01 (2-1)-«Электра»** является базовой моделью столика **СИЯ 2-01 -«Электра»**. Номинальная нагрузка на столик 13 кг, нагрузка на полку 5 кг, на ящик 3 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются две полки и один ящик на полозьях, выдвигающийся в обе стороны. Размер полки 570x360 мм, размер ящика 335x315x60 мм. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.** Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ.** Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие столика **СИЯ 2-01 (2-1)-«Электра»** требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

**Гарантийный талон**

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального **СИЯ 2-01 (2-1)-«ЭЛЕКТРА»** ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретен \_\_\_\_\_  
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_  
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца