

Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01-«Электра»

**Паспорт
МПЭЛ.942819.011-01 П**

НАЗНАЧЕНИЕ. Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01-«Электра» предназначен для крепления бутылок и контейнеров для крови и ее компонентов, трансфузионных и инфузионных лекарств и препаратов при проведении переливания крови и других лечебно-профилактических мероприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Штатив ШТ-01 «Электра»	565x565x1270÷2200 диаметр стойки 20мм *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	4

Высота штатива ШТ-01 регулируется от 1270 до 2200 мм. На держателе штатива могут располагаться 4 емкости (бутылки, контейнеры).

Штатив ШТ-01 должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку на держатель 8 кг.

Штатив должен быть устойчив на горизонтальной плоскости.

Средний срок службы штатива должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Штатив ШТ-01 подвижная, телескопическая стойка на колесиках с держателем на 4 емкости, стаканом и ключом. Штатив выполнен из нержавеющей стали и прошел электрохимическую полировку.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте штатив и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию штатива дезинфицирующими средствами.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Штатив поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр штатива на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения штатива	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие штатива ШТ-01 требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Штатива ШТ-01 «ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-011-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца