

Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (Б) - «Электра»
Паспорт
МПЭЛ.942819.007-02П

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01 (Б)-«Электра»	800x545x920÷1350* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	8

Столик СИО-01 (Б)-«Электра» является базовой моделью СИО-01 -«Электра». Размер полки – 740x510 мм. Равномерно распределенная нагрузка на полку 3 кг. Столик регулируется по высоте от 920 до 1350мм. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, выполненный из нержавеющей стали. На каркасе располагается полка, высота подъема которой регулируется, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИО-01 (Б)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-007-39548518-2003 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИО-01 (Б)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-007-39548518-2003

Заводской номер б/н

Дата выпуска 04.2024

Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца