

**Столик инструментальный
из нержавеющей стали передвижной с выдвигной полкой
для анестезиолога малый однотумбовый
СИА-01 (М)-«Электра»
Паспорт
МПЭЛ.942819.010-04П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля. Столик выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной с выдвигной полкой для анестезиолога малый однотумбовый СИА-01 (М)-«Электра»	525*х457*х880 525*размер по ручке для перемещения, в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	23

Столик СИА-01 (М)-«Электра» является модификацией базовой модели СИА-01-«Электра». Столик СИА-01 (М) снабжен тремя ящиками, верхний закрывается на ключ. Имеется также выдвигная полка для записей. Размер этой полки - 200х370 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 20кг. При этом равномерно распределенная нагрузка на столешницу составляет 10кг, на каждый ящик – 3кг, на выдвигную полку – 1кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас с тремя ящиками на колесиках, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается полка (столешница), выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИА-01 (М)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-010-39548518-03 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИА-01 (М)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-010-39548518-03

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца

