

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
 Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
 Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО» (далее - столик) предназначен для удобства забора крови или внутривенных манипуляций в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.

Столик изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина	550 ± 50 мм
Ширина	370 ± 50 мм
Высота	900 ± 20 мм
Масса	10 кг
Предельная рабочая нагрузка на столы, не более	30 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО»	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

Допускается поставка в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Столик для забора крови, изображенный на рисунке 1, имеет каркас, выполненный из стальных труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия и состоит из двух боковин 1 и двух стяжек 2.

4.2. Верхняя часть - панель 3 выполнена из ДСП, поролон и обтянута искусственной кожей.

4.3. Столик установлен на четыре регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое положение даже на неровном полу

4.4. Порядок сборки столика:

4.4.1. Для подготовки к работе, распакуйте и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозийную смазку протираяем насухо тампоном из марли, смоченным спиртом.

4.4.2. Возьмите боковины 1, закрепите на них верхнюю часть - панель 3 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Затем установите две стяжки при помощи болтов с шайбами.

Закрепите регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрите соединение гайками М8. Все резьбовые соединения должны быть прочно затянуты.

Выполните санитарную обработку столика.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
 (информация о производителе или фирме, или, от имени индивидуального предпринимателя, принимающей декларацию о соответствии)
 (зарегистрирована) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Нижегородской области, дата регистрации 21.10.2002, ОГРН 1025201635205
 (адрес и регистрация организации или индивидуального предпринимателя (информация о регистрационном номере, дата регистрации, регистрационный номер))
 Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062

адрес, телефон, факс

и лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

(полностью, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Тумбочки прикроватные ПП и ПП-1 по ТУ 9452-023-07614107-2005;

Штапы для длительных инфузионных инфузий на трех опорах ПШ-«ДЗМО» по ТУ 9452-004-07614107-99; Шерма одно-трехсекционная с полимерными панелями, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ПП 1/3-«ДЗМО» по ТУ 9452-007-07614107-99; Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 (состав: подставка для тазов, ПТ-«ДЗМО»; подставка для стерилизационных коробов (бюкс), ПСК-«ДЗМО»; столик для забора крови, СЗК-«ДЗМО»; стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО»; табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО»). Принадлежности: подставка для ног, газовая пружина;

(наименование, тип, марка продукции, на которую принимается декларация)

Серийный выпуск, Код ОКП 945210

(информация о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделия), ревизионный документ (сертификат), выданный код ОК 005-01 и (или) ТН ВЭД ТС код ОК 001-01 (ОКУН))

Изготовитель: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования", Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062

(адрес, телефон, факс)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-01 (Часть 3, 4)

(обязательно перечислить документы, соответствие которым подтверждено)

данной декларацией, с указанием пунктов тех нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСТК RU.OC06.000210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной ответственностью "ЛАНТА ЦЕНТР" (Свидетельство Рег. № РОСС RU.3608.041D000 от 02.11.2013 года, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Красносельская, дом 17. Регистрационные удостоверения №№ ФСР 2010/06821 от 12.11.2015 года, № ФСР 2012/13171 от 12.11.2015 года, ФСР 2012/13172 от 12.11.2015 года, ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

(информация о документах, являющихся основанием)

для принятия декларации)

Дата принятия декларации 11.12.2015

Декларация о соответствии действительна до 10.12.2018

М.П. Костров Андрей Владимирович
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
 Регистрационный номер РОСС RU.0001.11M058. Отдел по сертификации продукции ООО "ПромТест"
 (информация о органе по сертификации, принимающей декларацию)
 адрес: 112275, Москва, ул. Профсоюзная, 93А, стр. 2/1
 Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.0001.11M058.001691 от 11.12.2015
 (информация о органе по сертификации, принимающей декларацию)
 М.П. Дрозд Татьяна Осиповна, заместитель руководителя с
 (подпись, фамилия, имя, отчество)



4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- 4.5.1. Эксплуатация неисправного столика.
- 4.5.2. Самостоятельный ремонт столика неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.
- 4.5.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов столика во избежание получения травм и увечий.




Крепление панели 3
к боковине 1



Крепление стяжки 2
к боковине 1

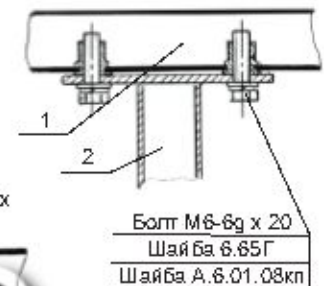

Крепление регулируемых
опор 4

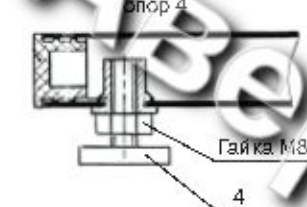

1 - боковина; 2 - стяжка; 3 - панель; 4 - регулируемая опора.

Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервируйте столик промышленной моющими растворами, проверьте отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей столика, убедитесь в надежности фиксации и крепления, при необходимости закрепите их.
- 5.2. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлормина по ТУ 6-01-4639387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.
- 5.3. Характерные неисправности столика: ослабление крепежных резьбовых и других элементов. Устраните их подтягиванием или заменой на годные элементы.



Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали столика должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2^{го} со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ГОСТ 38.01438-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Столик для забора крови СЗК-«ДСМО» подвергнут в АО «ДСМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документации, техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование столика должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации и товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельства выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Столик для забора крови	СЗК-«ДЗМО»	
Наименование изделия	Обозначение	

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества	

подпись	

расшифровка подписи	

число, месяц, год	
Сборщик / упаковщик	

ООО Торговый Дом

Место для
голограммы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара	СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-"ДЗМО"		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	24 месяца	со дня продажи	

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		 м.п.
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование покупателя		 м.п.
ФИО / Подпись		



ОКП 94 5210

ПУ № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 г.

ДС РОСС RU.MH08.D01691

ООО Торговый Дом "Аверс"

**СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-«ДЗМО»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СЗК.00.00 ПС**



Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru