

**ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ  
с креплением на кровать  
ШВ - «МСК» (МСК-311)  
ТУ 9452-001-52962725-2001**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Штатив медицинский для вливаний (далее по тексту — штатив) предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами на кроватях медицинских функциональных.
- 1.2. Штатив изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Основные параметры и размеры штатива указаны в таблице 1.

Таблица 1.

	Наименование параметров	Значение параметров
		МСК-311
1. Габаритные размеры:	высота max, мм	1800
	высота min, мм	1000
2. Масса штатива кг, не более:		4

- 2.2. Характеристики:
- 2.2.1. Штатив выдерживает нагрузку массой не более 5 кг.
- 2.2.3. Детали штатива имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.2.4. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 4 класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
- 2.2.5. Поверхность штатива устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.
- 2.2.6. Средний срок службы штатива до списания не менее 6 лет.  
За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки штатива соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Стойка в сборе	1
2	Держатель	1
3	Пластиковый колпак	2
4	Болт М8х40	2
5	Шайба 8 пружинная	2
6	Гайка М8	2
7	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Штатив состоит из:  
- стойки  
- держателя  
- колпаков
- 4.2. Стойка представляет собой телескопическую систему в виде двух труб, которая фиксируется с помощью резьбового зажима. Это позволяет установить флаконы на требуемую высоту. Штатив крепится к кровати при помощи струбины.
- 4.3. Держатель изготовлен из стального прутка и листового металла или пастмассы.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации штатива допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования штатива в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать штатив для вливаний и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:  
- установить держатель на стойке  
- установить колпаки в держатель  
- прикрепить штатив скобой стойки к раме кровати при помощи болтов М8, шайб 8 пружинных и гаек М8.  
- установить необходимую высоту и зафиксировать стойку при помощи резьбового зажима.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Штатив не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется периодически, 1 раз в 6 месяцев, производить проверку резьбовых соединений и в случае ослабления, производить их затяжку.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Штатив в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.
- 9.2. Хранение должно осуществляться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода штатива для вливаний в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Штатив для вливаний ШВ - «МСК»(МСК-311) \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.

Соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия

\_\_\_\_\_ номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_  
дата, подпись, штамп торгующей организации