

## 6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

**Адрес предприятия-изготовителя:** 246061, Республика Беларусь, г. Гомель,  
ул. Федюнинского, 19,  
ПУП «Ратон-МедТех»,  
тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

## 7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-11 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

**Столик медицинский инструментальный**

(наименование)

**СИ-11**

(обозначение)

**ТУ РБ 14440234.004-94**

(номер ТУ)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен \_\_\_\_\_  
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят  
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Производственное унитарное предприятие  
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный  
СИ-11

Паспорт



Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2012/11706 от 24.04.2017

## 1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-11 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

**Внимание! Столик не является транспортным средством!**

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

## 2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Расстояние между полками – 400 мм.

Масса столика не более 11 кг.

Максимальная нагрузка на столик не более 10 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

## 3 Комплектность

В комплект поставки входят: столик\* – 1 шт., паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

\* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт М6х90	- 8 шт.,
труба	- 4 шт.,	винт М10х20	- 4 шт.,
поддон	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	втулка	- 8 шт.
анкер	- 8 шт.		

## 4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса из профильных труб и 2 съемных поддонов. Столик установлен на 4 самоориентирующиеся колесные опоры Ø 50 мм, 2 из которых оборудованы стопорным механизмом. Каркас и поддоны, изготовленные из нержавеющей стали, устойчивы к многократным механическим и химическим воздействиям, к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами, водостойчивы, не содержат токсических и аллергических элементов.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с полок (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты М10х20 и шайбы следующим образом:
  - положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
  - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
  - установите винт М6х90 в отверстие с фаской стойки, наденьте на него втулку,

наверните анкер свободным концом до втулки, при этом не допускайте расширения другого конца анкера,

- аналогичные действия произведите со всеми отверстиями обеих стоек,

- соедините стойки между собой трубами, надев трубы на анкеры, при этом трубы должны упереться во втулки,

- поставьте каркас на пол, выровняйте вертикальное положение стоек нажатием на ручку стойки при зафиксированной колесной опоре,

- установите нижнюю полку, при необходимости выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- убедитесь, что трубы прилегают к втулкам, зажмите нижние винты до упора с помощью крестообразной отвертки,

- установите верхнюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения верхней полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- зажмите верхние винты до упора.

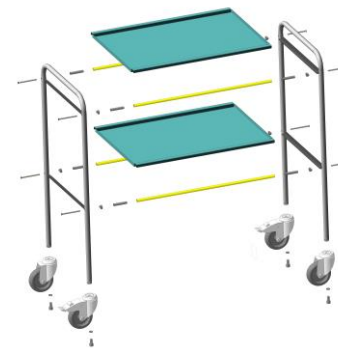


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

**Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью отвертки.**

## 5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.