

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПАКС металл  
серии ШРМ

по ТУ 9452-002-96303248-2016

Версия 02 от 07.12.2017

Номер РУ РЗН 2017/5700 от 23.12.2020

## СЕРИИ ШРМ



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по адресу <http://paksmet.ru/manual.html>

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: [www.paksmet.ru](http://www.paksmet.ru).

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы медицинские для одежды ШРМ-14, ШРМ-312, ШРМ-28 сумочницы (серии ШРМ)

1. Назначение:

Шкафы для одежды серии ШРМ предназначены для хранения сумок в супермаркетах и универсамах.

2. Технические характеристики:

Конструкция шкафов разборная из листовой холодной стали, толщина стали 0,7 мм. Шкафы оборудованы врезными замками «PaksLocks» (Германия). Полимерное покрытие Bihon (Франция).

Таб. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры упаковки, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШРМ -14 (1 шт.)	1860x300x500	1900x550x120	23	25
ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШРМ -14 (2 шт.)		1900x550x150	44	46
ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШРМ-28	1860X600X500	1900x550x150	40	42
ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШРМ-312	1860X900X500	1900x570x160	51	53

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

3.1. Шкафы эксплуатируются в офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Запрещается:

- Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы
- Наступать и наезжать на продукцию
- Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами
- Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п. 3., а также правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкафа вместе с паспортом необходимо вернуть производителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 производитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5.

### Комплект поставки ШРМ-14(1 шт.) / ШРМ-14 (2 шт.)

Дно ..... 1 шт.  
Задняя стенка ..... 1 шт. / 2 шт.  
Боковая стенка правая ..... 1 шт.  
Боковая стенка левая ..... 1 шт.  
Дверь ..... 4 шт. / 8 шт.  
Крыша ..... 1 шт. / 2 шт.  
Полка ..... 3 шт. / 6 шт.  
Замок PaksLocks ..... 4 шт. / 8 шт.  
Паспорт..... 1 шт.  
Упаковка (гофрокартон, коробка)..... 1 шт.  
Ось ..... 4 шт.  
Саморез 4,5x13.....12 шт. / 24 шт.  
Винт М5х16 .....4 шт.  
Шайба М4 ..... 3 шт. / 6 шт.  
Ось верхняя..... 1 шт. / 2 шт.  
Ключ для установки замков ..... 1 шт.

### Комплект поставки ШРМ-28

Дно ..... 1 шт.  
Боковая стенка правая .....1 шт.  
Боковая стенка левая .....1 шт.  
Крыша ..... 1 шт.  
Полка ..... 3 шт.  
Стенка задняя .....1 шт.  
Перегородка верхняя ..... 1 шт.  
Перегородка нижняя .....3 шт.  
Дверь ..... 8 шт.  
Ось ..... 8 шт.  
Замок ..... 8 шт.  
Саморез 4.5x13 .....14 шт.  
Винт М5х10 ..... 6 шт.  
Винт М5х16 ..... 4 шт.  
Ось верхняя ..... 2 шт.  
Гайка М5 ..... 6 шт.  
Шайба ..... 6 шт.  
Паспорт..... 1 шт.  
Упаковка (гофрокартон, коробка)..... 1 шт.  
Ключ для установки замков ..... 1 шт.


### Комплектация поставки ШРМ-312

Дно ..... 1 шт.  
Боковая стенка правая ..... 1 шт.  
Боковая стенка левая ..... 1 шт.  
Крыша ..... 1 шт.  
Полка..... 3 шт.  
Стенка задняя правая..... 1 шт.  
Стенка задняя левая ..... 1 шт.  
Перегородка верхняя..... 2 шт.  
Перегородка нижняя..... 6 шт.  
Дверь ..... 12 шт.  
Замок ..... 12 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.  
Упаковка (гофрокартон, коробка) ..... 1 шт.  
Ось ..... 12 шт.  
Ось верхняя ..... 3 шт.  
Саморез 4,5x13 ..... 21 шт.  
Винт М5х10..... 12 шт.  
Винт М5х16..... 4 шт.  
Гайка М5 ..... 12 шт.  
Шайба ..... 9 шт.  
Ключ для установки замков ..... 1 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Последовательность сборки изделия


1. Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.

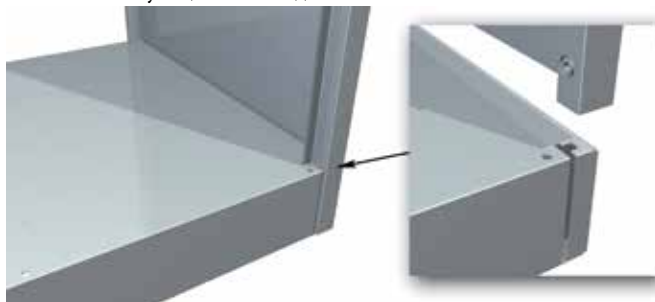


2. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Для облегчения сборки рекомендуется лишь слегка “наживить” саморезы, не затягивая до конца (либо вообще не устанавливая), а окончательную затяжку произвести после выполнения пункта 4 настоящей инструкции.




3. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

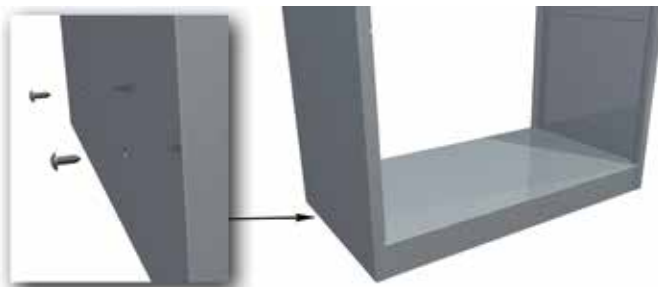


4. Положить изделие на горизонтальную поверхность передней частью вниз. Соединить боковые стенки с дном с помощью четырех винтов M5x16. После этого вернуть изделие в вертикальное положение.

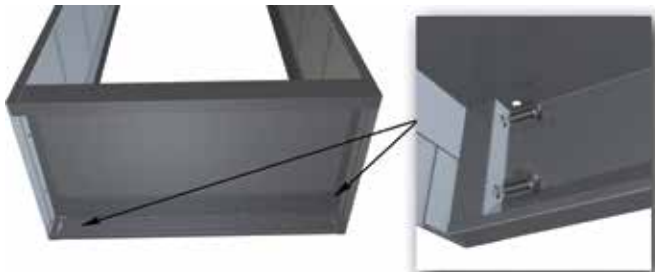


5. Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

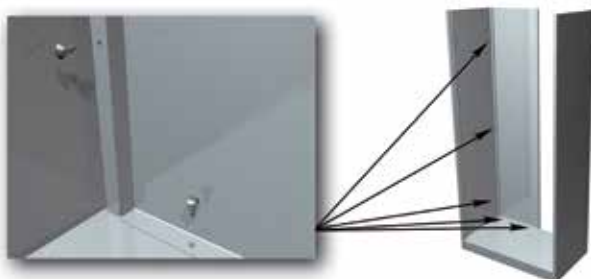

6. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с левой задней стенкой с помощью трех саморезов, с правой боковой стенкой – с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

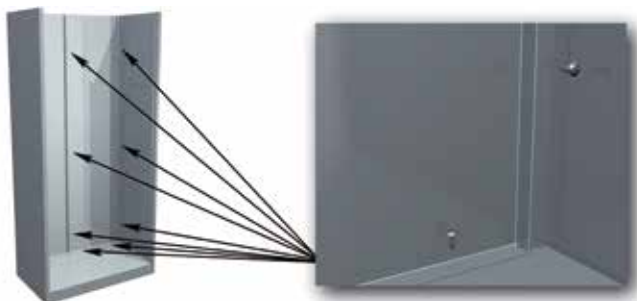


7. Установить полки. Установку рекомендуется начинать с нижней полки. Для установки полки следует завести ее в пространство между боковинами, повернуть вокруг продольной оси и завести таким образом, чтобы выступающий кронштейн оказался в прорези правой боковой стенки, а боковые отбортовки полки попали под фиксирующие полосы на боковых стенках. После этого опустить полку вниз до защелкивания замков фиксирующих полос в отверстиях полки.

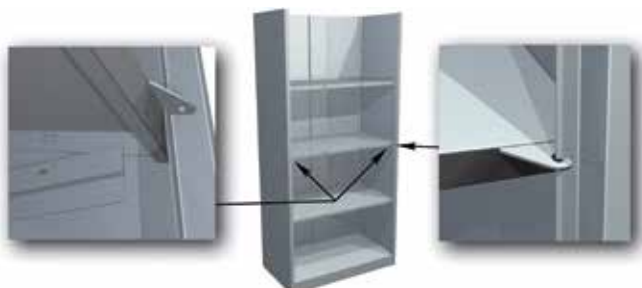

8. Установить крышу. При установке крыши боковые и задние стенки должны располагаться между внутренними боковыми поверхностями крыши и угловыми профилями. Крышу опустить вниз до защелкивания замков боковых стенок в отверстиях угловых профилей крыши.



9. Установить перегородки. Установку перегородок рекомендуется начинать с самой верхней. Верхние перегородки отличаются от нижних наличием на верхней отбортовке двух прямоугольных отверстий. Верхнюю перегородку завести верхней отбортовкой под фиксирующую полосу крыши и задвинуть до защелкивания замков. Затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Самую нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.

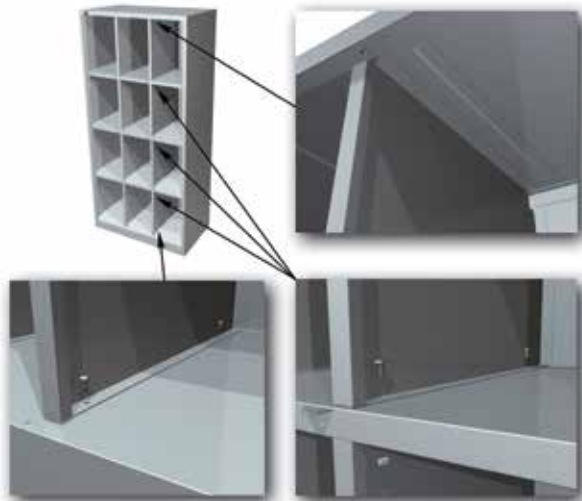

10. Установить двери в следующей последовательности. В отверстие дна вставить ось. Надеть дверь нижним отверстием на ось.



11. На верхнюю плоскость двери положить шайбу. Удерживая шайбу, верхнюю плоскость двери завести под кронштейн полки. Совместив соответствующие отверстия в двери и кронштейне, вставить ось. Аналогично



12. Вставить верхнюю ось в соответствующее отверстие крыши.



13. Самую верхнюю дверь надеть нижним отверстием на нижнюю ось. Затем «утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



14. Для установки на дверь замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.



Изделие готово к эксплуатации.

Медицинский шкаф Серии ШРМ модель \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.  
Производитель ООО "ПАКС-трейд", 141420, ГО Химки, мкр. Сходня,  
ул. Горная, д. 21 А, оф.13  
Тел.(495)574-21-85  
E-mail: sales@paksmet.ru  
www.paksmet.ru

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

