

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПАКС металл
серии ШРМ

по ТУ 9452-002-96303248-2016

Версия 02 от 07.12.2017

Номер РУ РЗН 2017/5700 от 23.12.2020



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте paksmet.ru

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы для одежды серии ШРМ

(ШРМ-АК, ШРМ-АК/500, ШРМ-АК/800, ШРМ-11, ШРМ-11/400, ШРМ-12, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-21, ШРМ-24, ШРМ-24.О, ШРМ-АК-У)

1. Назначение:

Шкафы для одежды серии ШРМ предназначены для хранения одежды и личных вещей.

2. Технические характеристики:

врезными замками «PaksLocks» (Германия). Полимерное покрытие Bihon (Франция).

Конструкция шкафов разборная из листовой стали. Шкафы оборудованы

Таб. Основные технические данные:

Таб. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры упаковки, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
Шкаф медицинский ШРМ-АК/500	1860x500x500	1900x570x130	29	31
Шкаф медицинский ШРМ-АК	1860x600x500	1900x570x140	32	33
Шкаф медицинский ШРМ-АК/800	1860x800x500	1900x570x150	38	40
Шкаф медицинский ШРМ-11	1860x300x500	1900x550x120	19	20
Шкаф медицинский ШРМ-11 (2 шт.)	1860x300x500	1900x550x150	36	37
Шкаф медицинский ШРМ-11/400	1860x400x500	1900x550x120	24	25
Шкаф медицинский ШРМ-11/400 (2 шт.)	1860x400x500	1900x550x150	47	48
Шкаф медицинский ШРМ-12	1860x300x500	1900x550x120	19	20
Шкаф медицинский ШРМ-12 (2 шт.)	1860x300x500	1900x550x150	36	37
Шкаф медицинский ШРМ-22 У	1860x600x500	1900x550x150	36	37
Шкаф медицинский ШРМ-22/800 У	1860x800x500	1900x550x150	43	45
Шкаф медицинский ШРМ-21	1860x400x500	1900x550x120	28	29
Шкаф медицинский ШРМ-24	1860x600x500	1900x570x150	30	32
Шкаф медицинский ШРМ-24.О	1860x600x500	1900x570x150	33	35
Шкаф медицинский ШРМ-АК-У	1860x500x500	1900x570x130	27	28

3.1. Шкафы эксплуатируются в офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Запрещается:

- Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.
- Наступать и наезжать на продукцию
- Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами.
- Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3., а также правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть производителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 производитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплектность поставки:

Комплектность поставки ШРМ-АК, ШРМ-АК/500

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь правая - 1 шт.
7. Дверь левая - 1 шт.
8. Полка - 2 шт.
9. Перегородка - 1 шт.
10. Перекладина - 1 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
13. Заглушка перекладки - 2 шт.
14. Замок - 2 шт.
15. Саморез 4,5x13 - 14 шт.
16. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-11, ШРМ-11/400

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 1 шт.
7. Полка - 1 шт.
8. Перекладина - 1 шт.
9. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
10. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
11. Заглушка перекладки - 2 шт.
12. Замок - 1 шт.
13. Саморез 4,5x13 - 12 шт.
14. Крючок - 2 шт.

Комплектность поставки ШРМ-21

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.

Комплектность поставки ШРМ-АК/800

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя правая - 1 шт.
5. Стенка задняя левая - 1 шт.
6. Крыша - 1 шт.
7. Дверь правая - 1 шт.
8. Дверь левая - 1 шт.
9. Полка - 2 шт.
10. Перегородка - 1 шт.
11. Перекладина - 1 шт.
12. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
13. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
14. Заглушка перекладки - 2 шт.
15. Замок - 2 шт.
16. Саморез 4,5x13 - 21 шт.
17. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-12

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 2 шт.
7. Полка средняя - 1 шт.
8. Перекладина - 2 шт.
9. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
10. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
11. Заглушка перекладки - 4 шт.
12. Замок - 2 шт.
13. Саморез 4,5x13 - 12 шт.
14. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Перегородка - 1 шт.

6. Дверь - 1 шт.
7. Полка - 1 шт.
8. Перегородка – 1 шт.
9. Перекладина - 1 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
12. Заглушка перекладки – 2 шт.
13. Замок - 1 шт.
14. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
15. Крючок – 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-24.О

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 4 шт.
7. Полка средняя - 1 шт.
8. Полка – 4 шт.
9. Перегородка – 2 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 4 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 4 шт.
12. Замок - 4 шт.
13. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
14. Винт М5х10 – 2 шт.
15. Гайка М5 – 2 шт.

Комплектность поставки ШРМ-АК-У

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Перегородка – 1 шт.
7. Дверь - 1 шт.
8. Полка - 3 шт.
9. Перекладина - 1 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
12. Заглушка перекладки – 2 шт.
13. Замок - 1 шт.
14. Саморез 4.5x13 - 12 шт.
15. Крючок – 2 шт.
16. Винт М5х10 – 3 шт.
17. Гайка М5 – 2 шт.

7. Дверь правая - 1 шт.
8. Дверь левая – 1 шт.
9. Полка - 5 шт.
10. Перекладина - 1 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
13. Заглушка перекладки – 2 шт.
14. Замок - 2 шт.
15. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
16. Крючок – 2 шт.



Комплектность поставки ШРМ-24

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь правая - 2 шт.
7. Дверь левая – 2 шт.
8. Полка средняя - 1 шт.
9. Перегородка – 2 шт.
10. Перекладина - 2 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 4 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 4 шт.
13. Заглушка перекладки – 4 шт.
14. Замок - 4 шт.
15. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
16. Крючок – 8 шт.
17. Винт М5х10 – 2 шт.
18. Гайка М5 – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТЕНОК

Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

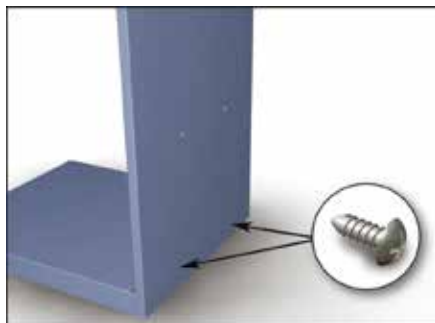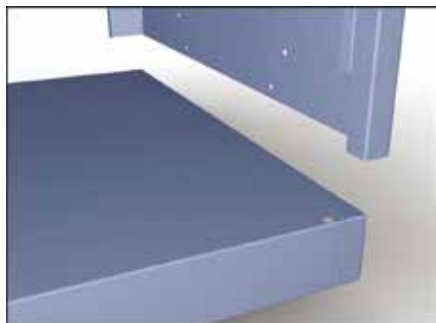

2. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (КРОМЕ ШРМ-12, ШРМ-24, ШРМ-24.О, ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У)

Установить заднюю стенку, соединив ее с боковыми стенками с помощью шести саморезов.


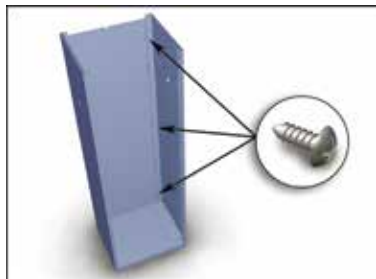


2.1. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФОВ ШРМ-12, ШРМ-24, ШРМ-24.О

Установить заднюю стенку (так, как это изложено в пункте 2. Настоящей инструкции), но соединив ее с боковыми стенками с помощью четырех саморезов. Для крепления необходимо использовать верхние и нижние отверстия в задней стенке. В средние отверстия саморезы заворачивать не нужно.

2.2. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФА ШРМ-АК/800

Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой тремя саморезами и с дном – одним саморезом. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с правой боковой стенкой тремя саморезами и с дном – одним саморезом. Соединить задние стенки между собой одним саморезом посередине.

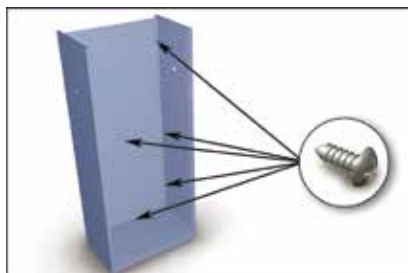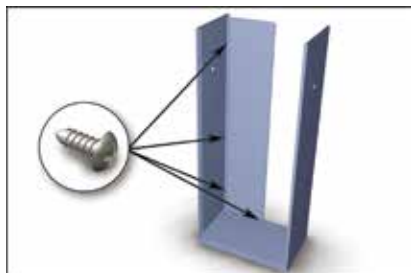


2.3. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФОВ ШРМ-22 У И ШРМ-22/800 У

Установить задние стенки так, как это изложено в пункте 2.2 настоящей инструкции, с той разницей, что задние стенки друг с другом свинчивать не нужно.



3. УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ПОЛКИ (ШРМ-12, ШРМ-24, ШРМ-24.О)

Завести полку внутрь шкафа, и слегка приподняв заднюю часть, вставить ее в соответствующие пазы в боковых стенках. Опустить заднюю часть полки и прикрепить ее к задней стенке с помощью двух саморезов.

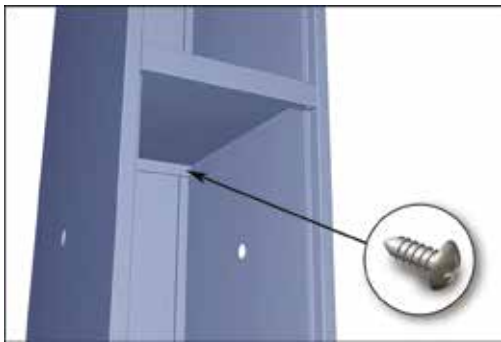



4. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ (КРОМЕ ШРМ-21, ШРМ-24, ШРМ-24.О, ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-АК-У)

Установив перегородку на дно шкафа, вставить ее в соответствующий паз в верхней части задней стенки. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

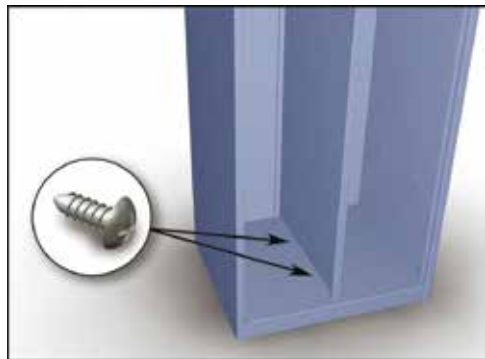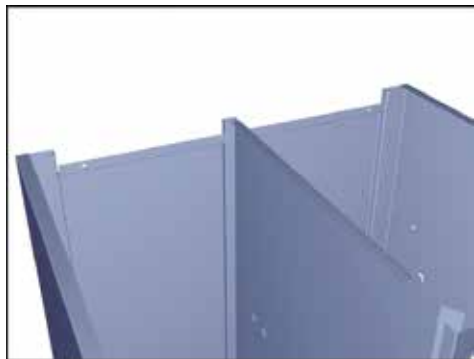



4.1. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ШКАФОВ ШРМ-24, ШРМ-24.О

Установив верхнюю перегородку на среднюю полку шкафа, вставить ее в соответствующий паз в верхней части задней стенки. Установить нижнюю перегородку на дно шкафа, затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.

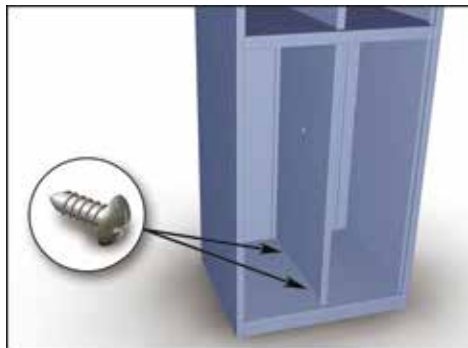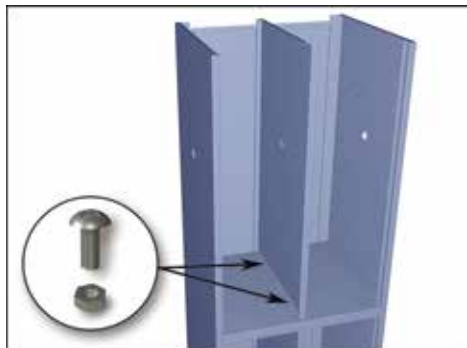


4.2. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФА ШРМ-21

Установить полку, надев ее на соответствующие крючки на боковых стенках. Входная щель фиксирующей полосы на дне полки должна быть направлена вправо. Перегородку завести верхней отбортовкой под фиксирующую полосу полки и задвинуть до защелкивания замков. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

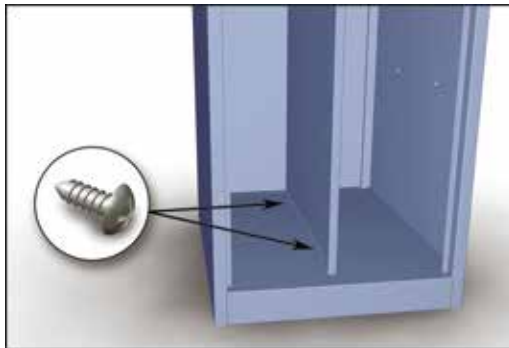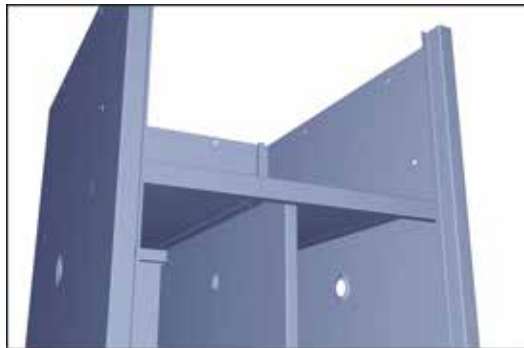


4.3. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФОВ ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

Установив перегородку на дно шкафа, соединить ее с задней стенкой с помощью двух саморезов. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

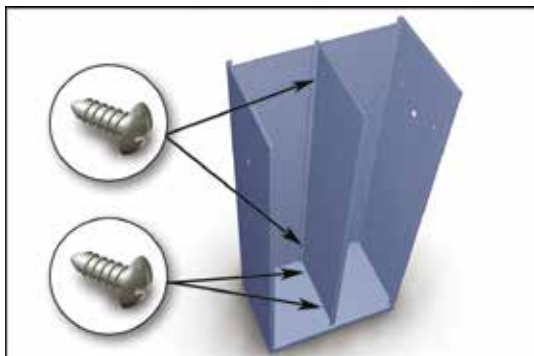



4.4. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФА ШРМ-АК-У

Повесить перегородку соответствующими отверстиями на крючки, расположенные на задней стенке. После установки крыши соединить перегородку с передней частью крыши с помощью винта.

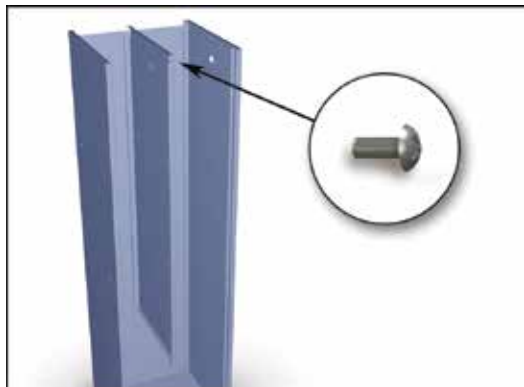

5. УСТАНОВКА КРЫШИ

Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.

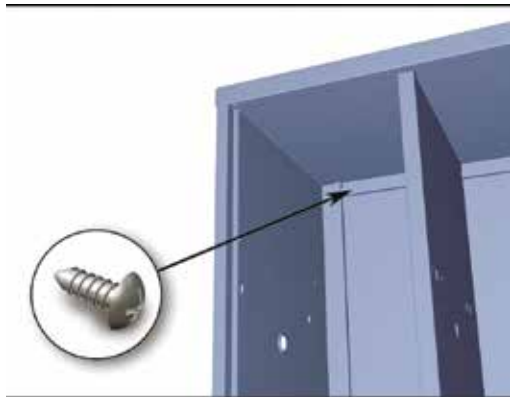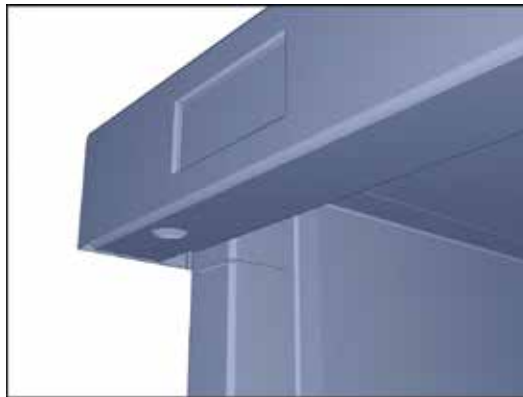

6. УСТАНОВКА ПЕРЕКЛАДИНЫ И КРЮЧКОВ

Установить перекладину, для чего установить заглушку в соответствующее отверстие правой боковой стенки, вставить перекладину в отверстие левой боковой стенки и задвинуть до упора, по мере продвижения надевая на нее крючки (по два в каждой секции). Затем установить заглушку на левую боковую стенку.



7. УСТАНОВКА ПОЛОК (КРОМЕ ШКАФОВ ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-АК-У)

Установить полки, надев их на соответствующие крючки на боковинах стенок (ИЛИ НА ПЕРЕГОРОДКЕ).




7.1 УСТАНОВКА ПОЛОК ШКАФОВ ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

Установить полки в левом отделении шкафа так, как это описано в пункте 7 настоящей инструкции. Для установки полок в правом отделении шкафа необходимо на нужной высоте вставить кронштейны полок в соответствующие отверстия в задней стенке и передней части боковых стенок, после чего опустить полку на кронштейны.



7.2 УСТАНОВКА ПОЛОК ШКАФА ШРМ-АК-У


Установить нижнюю полку, повесив ее с левой стороны на крючки боковой стенки, а с правой стороны – на отгиб перегородки. Прикрепить полку к перегородке с помощью двух винтов с гайками. Оставшиеся полки установить так, как это описано в пункте 7 настоящей инструкции.

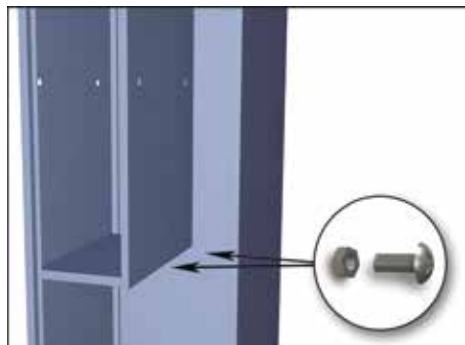

8. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (КРОМЕ ШРМ-12, ШРМ-24, ШРМ-24.О)

Вставить оси с пластиковыми наконечниками в соответствующие отверстия в дне. Вставить оси с металлическими наконечниками в соответствующие отверстия крыши. Надеть дверь соответствующим отверстием на ось с пластиковым наконечником. «Утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



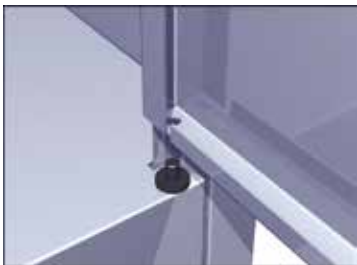

8.1. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (ШРМ-12, ШРМ-24, ШРМ-24.0)

Установка дверей производится в той же последовательности, как это описано в пункте 8 настоящей инструкции, с той разницей, что оси с пластиковыми наконечниками устанавливаются в верхние и нижние отверстия средней полки, а оси с металлическими наконечниками – в отверстия дна и крыши.

9. УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Для установки замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.



Изделие готово к эксплуатации

ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСТАЛЬНЫМ ПРЕДЛАГАЕМЫМ АССОРТИМЕНТОМ ЗАВОДА «ПАКС-МЕТАЛЛ»:



ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТЕЛЛАЖИ



ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ



СУМОЧНИЦЫ



СЕЙФЫ



ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



ВЕРСТАКИ



КЛЮЧНИЦЫ,
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ PAKSMET.RU

Медицинский шкаф Серии ШРМ модель _____
Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
Производитель ООО "ПАКС-трейд", 141420, ГО Химки, мкр. Сходня,
ул. Горная, д. 21 А, оф.13
Тел.(495)574-21-85
E-mail: sales@paksmet.ru
www.paksmet.ru

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

