

## **6. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации**

- 6.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 6.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стены транспортных средств.
- 6.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.
- 6.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности 45-70%.
- Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.
- Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## **7. Гарантийные обязательства, свидетельство о приемке**

- 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели – 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 7.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.
- Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантитного талона и упаковочных этикеток. За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_

Упаковщик: \_\_\_\_\_

**Предприятие-изготовитель: ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18


E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Арт.	Наименование
СК.01.07	Стол для кабинета врача (вид 156900)

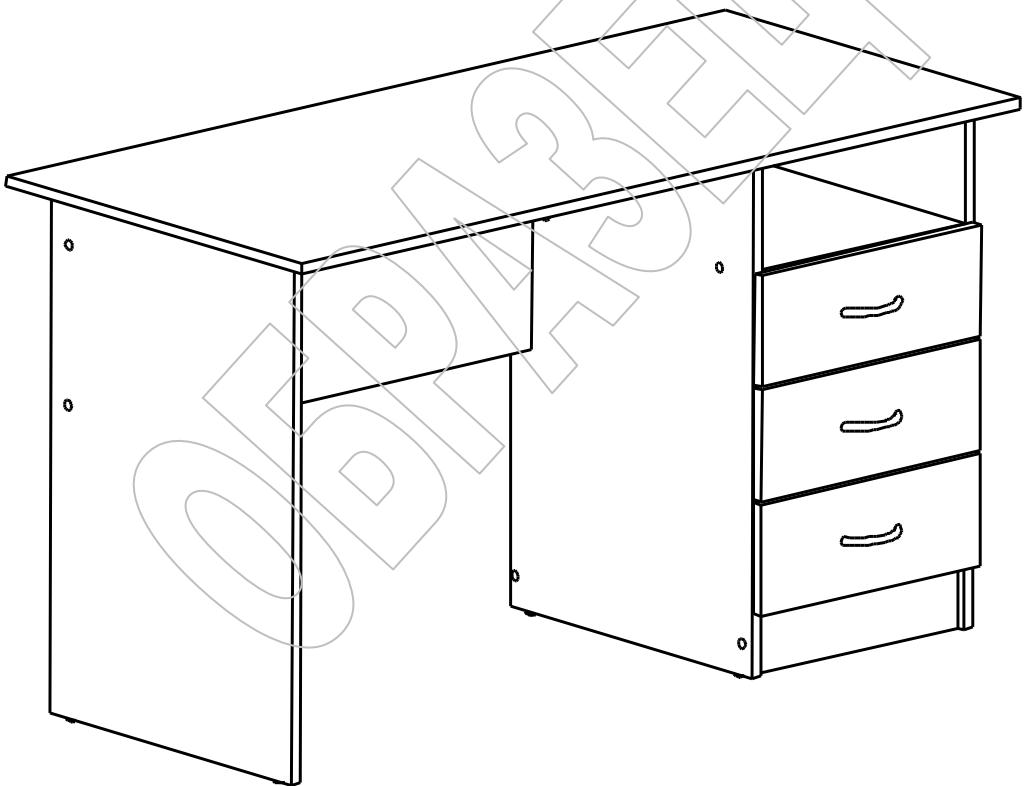

ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

## 1. Назначение

1.1 Стол предназначен для оснащения кабинетов медицинских учреждений, используется для организации рабочего места.

## 2. Основные технические характеристики

2.1 Корпус и крышка стола выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, днища ящиков – из ДВПО толщиной 3.2 мм. Применяемая мебельная фурнитура позволяет многократную сборку и разборку изделия.

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		ширина	глубина	высота	
СК.01.07	Стол однотумбовый. Тумба с 3-мя ящиками и нишой.	1300	600	750	42

## 3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Стол в разобранном виде с комплектом фурнитуры	1
Паспорт	1
Упаковка	1

## 4. Сборка стола

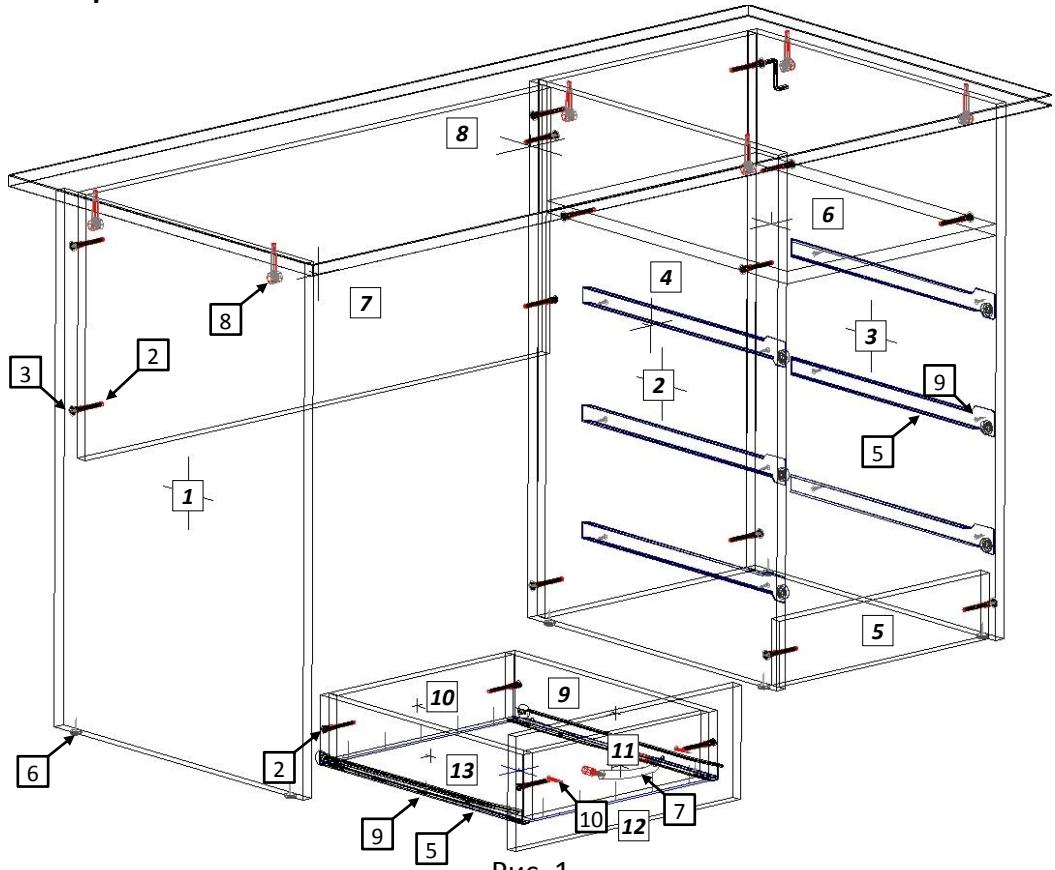


Рис. 1

- 4.1 Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
- 4.2 На вертикальных боковых стенках стола [1,2,3] установите подпятники (6); установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (8). На крышке стола [8] установите штоки эксцентр. стяжек (8). На бок. стенках [2,3] шурупами 4×16 (9) закрепите [-образные части роликовых направляющих (5).
- 4.3 Евровинтами (2), как показано на рис. 1, соедините боковые стенки стола [1,2,3] с вертик. стенками [4,6] и цоколем [5]. Установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Закройте головки евровинтов (2) заглушками (3).
- 4.4 Сборка ящиков. Евровинтами (2) соедините боковые стенки ящика [9] с передней [11] и задней [10] стенками. Дно ящика [13] закрепите к перед. и зад. ст. гвоздями (1). Установите роликами назад J-образные части направляющих (5) и закрепите их шурупами 4×16 (9). Шурупами 3.5×30 (10) закрепите фасад [12] к перед. стенке ящика [11]. Установите ручку (7). Установите собранные ящики в корпус стола.

## 5. Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№	Наименование	A мм.	B мм.	Кол.
1	Ст. бок. лев.	730	490	1
2	Ст. бок. лев.	730	490	1
3	Ст. бок. прав.	730	490	1
4	Ст. вертик. зад.	730	368	1
5	Цоколь	90	368	1
6	Ст. гор.	473	368	1
7	Ст. вертик.	816	362	1
8	Крышка	1300	600	1
9	Бок. ящ.	400	90	6
10	Зад. ящ.	310	90	3
11	Перед. ящ.	310	90	3
12	Фасад ящика	156	396	3
13	Дно ящ. ДВПО	400	340	3

№	Наименование	Кол.
1	Гвоздь	30
2	Евровинт 7 x 50	26
3	Заглушка для евровинта	13
4	Ключ для евровинта	1
5	Компл. роликовых напр. 400	3
6	Подпятник с гвоздем	6
7	Ручка	3
8	Стяжка эксцентр.	6
9	Шуруп 4 x 16	30
10	Шуруп 3.5 x 30	6