

**ПОДСТАВКА
ПП-02 (с двумя ступенями)
«ЭЛЕКТРА»**

**для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок,
массажных кушеток, гинекологических кресел.**

**Паспорт
МПЭЛ.942819.012-02 П**

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка ПП-02 (с двумя ступенями из нерж. стали) «ЭЛЕКТРА» для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок, массажных кушеток, гинекологических кресел и т.п. предназначена для использования в больницах, госпиталях, медицинских центрах, домах инвалидов и престарелых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПП-02 «Электра» (с двумя ступенями)	455x580x400*в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	9

Подставка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не более 150 кг.

Подставка должна быть устойчива на горизонтальной плоскости. Средний срок службы подставки должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

Подставка представляет собой каркас, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагаются две ступени из нержавеющей стали. Высота первой ступени 200 мм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте подставку и очистите ее от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию подставки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Подставка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готова к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр подставки на отсутствие внешних повреждений

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Неплотное прилегание ступени к корпусу	Ослабли винты, соединяющие ступень с каркасом	Подтянуть винты

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие подставки ПП-02-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-012-39548518-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока подставки ПП-02(с двумя ступенями) «ЭЛЕКТРА» для медицинских кроватей, перевязочных столов, медицинских каталок, массажных кушеток, гинекологических кресел ТУ 9452-012-39548518-2004

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретена _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введена в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принята на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца