

**Столик инструментальный из нержавеющей стали
с двумя полками передвижной
СИЯ 2-01 (2-0)-«Электра»**

**Паспорт
МПЭЛ.942819.003-30П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Столик выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный из нержавеющей стали с двумя полками передвижной без ящиков СИЯ 2-01 (2-0)-«Электра»	635x495x880* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15мм	9

Столик СИЯ 2-01 (2-0)-«Электра» является модификацией базовой модели столика СИЯ 2-01 - «Электра». Размер полки - 570x360 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 10 кг, нагрузка на полку 5 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются две полки. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИЯ 2-01 (2-0)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИЯ 2-01 (2-0)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца