

Столик – тележка для хозяйственных нужд СИ 2-01 (ХН)-«Электра»

**Паспорт
МПЭЛ.942819.003-29П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик – тележка предназначен для использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик- тележка для хозяйственных нужд СИ 2-01 (ХН)-«Электра»	560x410x870* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 5 мм	11,8

Столик –тележка для хозяйственных нужд из нержавеющей стали является модификацией базовой модели СИ 2-01- «Электра». Емкость контейнера 110 литров. Внутренний размер полки -500x345 мм. Столик - тележка должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 7 кг. Средний срок службы столика - тележки должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик – тележка представляет собой подвижный каркас на колесиках. На обрешеченном каркасе располагаются нижняя и верхняя (в виде крышки с ручкой) полки. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик -тележку и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика-тележки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик – тележка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика-тележки на отсутствие внешних повреждений
2.Усилия, прилагаемые для перемещения столика-тележки	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика-тележки СИ 2-01 (ХН)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Столика – тележки СИ 2-01 (ХН)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-003-39548518-04
Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца