



ПАСПОРТ

Тумба медицинская MET в варианте исполнения MET TL-220



- * Цвет фасада изделия может отличаться в зависимости от комплектации
- * Изделие поставляется с фасадами 2х цветов: серый, синий.

Габаритные размеры, см	Примечание
Ширина: 46,5 Глубина: 47 Высота: 80	Столешница с отбортовкой по бокам и задней стороне. Опорные колеса \varnothing 50 мм. Вес изделия – 10 кг.

1. Предназначение

Изделие предназначено для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Общие характеристики

Изделие в составе:

- Выдвижной ящик,
- Корпус тумбы;
- Столешница тумбы;
- Выдвижная полка;
- Полка;
- Инструкция по эксплуатации.

3. Описание

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из высокопрочного АБС-пластика.

Столешница изготовлена из высокопрочного АБС пластика и оборудована бортиком на боковой и задней стороне для избегания несанкционированного падения предметов со столешницы.

В верхней части боковых стенок изделия располагаются две (по одной с каждой стороны) выдвижные ручки из металла/пластика для обеспечения возможности удобного переноса или передвижения изделия. Выдвижные ручки для переноса изделия также выполняют функцию держателей полотенец в выдвинутом положении.

Слева и справа от каждой ручки для переноса располагается выдвижной крючок, выполняющий функцию держателя для полотенец, либо других необходимых пациенту приспособлений.

Изделие оборудовано четырьмя колёсными опорами диаметром 50 мм, исключающими повреждение напольного покрытия.

Каждая колёсная опора изделия оснащена индивидуальным тормозным устройством для фиксации изделия в неподвижном положении на напольном покрытии.

Цвет изделия – серый, бежевый или максимально близкий цветовой эквивалент в зависимости от выбранной комплектации.

Цвет столешницы и фасадов изделия – серый, или синий или максимально близкий цветовой эквивалент в зависимости от выбранной комплектации.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, хранение

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги.

5. Сборка

<p>Шаг 1</p>  A photograph showing the front panel of a blue and white device being inserted into a metal frame.	<ul style="list-style-type: none">• Поставьте переднюю стенку изделия на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на пол.• Присоедините к ней боковые стенки.	<p>Шаг 2</p>  A photograph showing the bottom panel of the device being inserted into the side rails of the frame.	<ul style="list-style-type: none">• Вставьте дно в пазы боковых стенок изделия.
<p>Шаг 3</p>  A photograph showing the rear panel of the device being attached to the back of the metal frame.	<ul style="list-style-type: none">• Переверните конструкцию для установки задней стенки и колес	<p>Шаг 4</p>  A photograph showing a white tray with multiple compartments being placed inside the device's frame.	<ul style="list-style-type: none">• Установите заднюю стенку на основу изделия
<p>Шаг 5</p>  A close-up photograph of a hand using a screwdriver to install a wheel into a hole on the bottom of the device's frame.	<ul style="list-style-type: none">• Установите колеса в отверстия на дне изделия	<p>Шаг 6</p>  A photograph showing the blue lid of the device being placed on top of the assembled frame.	<ul style="list-style-type: none">• Переверните конструкцию.• Приставьте столешницу к верхней части изделия, затем аккуратно закрепите ее (например, при помощи киянки).

<p>Шаг 8</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Вставьте полку в отделение. • Вставьте выдвижной столик и ящик 		
---	---	--	--

6. Уход

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

7. Гарантия

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____
