

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Наркозный экран предназначен для отделения стерильной зоны при проведении операций и процедур на столах операционных универсальных СОу - «МСК», изготовленных по ТУ 9452-027-52962725-2008.
- 1.2. Наркозный экран изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Основные параметры и размеры наркозного экрана указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-629/1
1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм	750x730
2. Диапазон регулирования по высоте, мм	550
3. Масса кг, не более:	1

**2.2. Характеристики:**

- 2.2.1. Стойка наркозного экрана выдерживает нагрузку массой не более 5 кг.
- 2.2.2. Наркозный экран устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.
- 2.2.3. Поверхность наркозного экрана устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки наркозного экрана соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Вертикальная стойка	1
2	Планка горизонтальная	1
3	Резьбовой фиксатор	1
4	Универсальный зажим	1
5	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Наркозный экран представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальной стойки, планки горизонтальной, фиксатора и универсального зажима.
- 4.2. Наркозный экран изготовлен из нержавеющей стали.
- 4.3. Универсальный зажим предназначен для крепления вертикальной стойки наркозного экрана к рейке операционного стола и позволяющий регулировать ее положение по высоте, вдоль панели стола и вокруг вертикальной оси.
- 4.4. Резьбовой фиксатор, расположенный на вертикальной стойке, позволяет регулировать положение горизонтальной планки в направлении поперечном панели стола.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации наркозного экрана допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать изделие и проверить целостность деталей.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:
  - установить универсальный зажим на рейку операционного стола и зафиксировать;
  - вставить вертикальную стойку в зажим и зафиксировать на необходимой высоте;
  - выдвинуть на необходимую длину горизонтальную планку и зафиксировать.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Наркозный экран не требует специального технического обслуживания.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
- 9.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Наркозный экран МСК-629/1  
 Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.  
 Соответствует ТУ 9452-027-52962725-2009 и признан годным к эксплуатации.  
 Подпись лиц, ответственных за приемку. \_\_\_\_\_

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_  
 Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_  
 Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Приобретено \_\_\_\_\_  
 Дата, подпись, штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «Медстальконструкция»  
 Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

