

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

## **ООО «ЭсДжиМедикал»**

Российская Федерация, г. Москва, улица Вятская, д.70, этаж 5,  
помещение 1, комната 27. Тел: (495) 120-10-67

# **МАТРАЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

## **Проект ЭМ.СМ.02.00.00.00.00**

## **Паспорт**

### **Назначение изделия:**

1. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях для настила поверх ложа кроватей или диванов, имеющих жесткую основу, исключая механические повреждения чехла матраца.

### **Правила хранения, транспортировки и эксплуатации.**

1. Матрац должен храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-температура окружающей среды в диапазоне от 0° до +40°С.

2. Исключается попадание на матрац горюче-смазочных жидкостей и материалов, химикатов. При использовании на матраце несъемного или съемного чехла, допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов.

3. Запрещается прыгать на матраце и использовать не по назначению.

4. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке,

автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учётом следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -40° до +40°С.

5. Матрац может подвергаться сухой химической чистке, обработке в дезкамере при температуре не более 120 °С. При обработке в дезкамерах, наматрачник должен располагаться на неметаллических решетках.

6. Сушка производится при температуре не более 100 °С исключительно в сушильных автоматах, либо при естественной температуре окружающей среды в подвешенном или расправленном состоянии.

7. В целях предотвращения повреждения чехол, снятый с матраца, категорически запрещается подвергать ручной стирке и отжиму, не допускается ставить на него предметы, имеющие острые и режущие опоры, предметы, нагретые до температуры выше 40 °С, а также подвергать поверхность матраца воздействию любых химически агрессивных веществ и растворителей.

#### Технические характеристики:

1. Матрацы двусторонней мягкости, сформированы на основе пенополиуретана эластичного и пенополиуретана вторичного вспенивания.

2. Облицовочный материал – чехол может изготавливаться из кожзаменителя ПВХ ГОСТ 28461-90; синтетической ткани с полиуретановой мембраной; синтетического трикотажа с полиуретановой мембраной ГОСТ 28496-90; хлопчатобумажных и смесовых тканей ГОСТ 29298-2005. Допускается в качестве облицовочного материала матрацев применять ткани – льняные, п/льняные, хлопчатобумажные и специальные матрацные: капроново-вискозные, набивные, шелковые и другие специальные ткани, равноценные перечисленным.

3. В облицовочных чехлах допускается применять молнии, текстильные застежки, кнопки или пуговицы.

4. Чехлы изготавливаются с одним швом по тыльным боковым поверхностям. Молния вшивается по торцу матраца с охватом по бокам не менее 15 см. Швы со стороны верхнего торца (изголовья), а также лицевой и тыльной поверхности отсутствуют. Ткань может иметь антибактериальную и противопожарную обработку поверхности, высокоустойчива к гидролизу, разрыву и трению, к плесени, к грибкам, выдерживает длительный (не менее 3-х лет) срок

эксплуатации, обеспечивает легкий уход, не сминается, максимально препятствует соскальзыванию постельного белья.

5. Матрац упакован в индивидуальный полиэтиленовый мешок.

6. Габаритные размеры матраца мм:

Длина от 700 мм до 2000 мм

Ширина от 500 мм до 1000 мм

Высота от 20 мм до 200 мм

Предельно допустимые отклонения от размеров:

- по длине +/- 10 мм

- по ширине +/- 10 мм

- по высоте +/- 5 мм

Масса от 0,25 кг до 25 кг

Масса упаковки – 0,1 кг.

Количество мест 1

#### Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.

2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Изготовлен в соответствии с ТУ 09922741-02-2015

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д -RU.PA01.V.19026/21 (срок действия с 21.07.2021 по 20.07.2024 г.)

Код ОКПД 2: 31.03.12

Код ТН ВЭД: 9404 29 900 0

Помощник руководителя  Мочегова Е.А.

Штамп ОТК



Дата выпуска: 2022 г