

ПАСПОРТ ООО МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ (С ЕДИНЫМ ЛОЖЕМ)
КФО-01- «МСК»(МСК-106М)
ТУ 9452-001-52962725-01**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Кровать медицинская (далее по тексту — кровать) предназначена для использования в общественных учреждениях для людей с острыми расстройствами психики.
1.2. Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

- 2.1.1. Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-106М
1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм	2050х900х840
2. Масса, кг, не более	40

- 2.2. Кровать выдерживает равномерно распределенную по ложу статическую нагрузку не более 200 кг.

- 2.2.1. Кровать стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм.

- 2.2.2. Металлические элементы кровати имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛИАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

- 2.2.3. Поверхность кровати устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки кроватей МСК-106М:

- подматрачная рама	- 1 шт.,	- болт М 6х35	- 8 шт.,
- спинка	- 2 шт.,	- гайка М 6	- 8 шт.,
- болт М8 х70	- 8 шт.,	- шайба 6	- 8 шт.,
- гайка М8	- 8 шт.,	- уголок левый	- 2 шт.,
- шайба 8 пружинная	- 8 шт.,	- уголок правый	- 2 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кровати изготавливаются из стальных труб, стального листа, стального профиля прямоугольного сечения,

- 4.2. Базовая конструкция состоит из следующих узлов: подматрачной рамы, спинок.

- 4.3. Панели спинок и подматражной рамы выполнены из сплошного стального листа, без отверстий, пазов и щелей.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию кроватей.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

- 6.2. Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

- 6.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед работой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

- 7.2. Прикрепите раму к спинкам при помощи уголков, болтов М6х35 и М 8х70, гаек и шайб.

- 7.3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Кровать имеют простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

- 8.2. Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

- 8.3. В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

- 9.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.

- 10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

- 10.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

- 10.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская общебольничная (с единым ложем) КФО-01- «МСК»

Соответствует ТУ 9452-001-52962725-01 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

(Хабидуллин Р.Р)

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____

Приобретен _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазьевская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

