# Столик инструментальный передвижной с двумя полками из нержавеющей стали и одним ящиком СИ 2-01 (2H-1)-«Электра»

### Паспорт МПЭЛ.942819.003-04П

**НАЗНАЧЕНИЕ**: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебнопрофилактических учреждений различного профиля.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса. кг
Столик инструментальный передвижной с двумя полками из нержавеющей стали и одним ящиком СИ 2-01 (2H-1)-«Электра»	565х385х870* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	6

Столик **СИ 2-01** (2H-1)-«Электра» является модификацией базовой модели столика **СИ 2-01** -«Электра». Размер ящика 335х220х60 мм. Размер полки 500х345 мм. Равномерно распределенная нагрузка на столик 13 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются две полки и один ящик на полозьях, выдвигающийся в обе стороны. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с
перемещения столика	пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние	Вероятная причина	Метод устранения
проявления и дополнительные признаки		
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий	Подтянуть винт
	опору со стойкой	

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИ **2-01** (2H-1)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок –24 месяца со дня передачи товара покупателю.

### Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантиино	ого срока
Столика инструментального СИ 2-01 (21	Н-1)-«ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-003-39548518-04
Заводской номер: б/н. Дата выпуска:	
Приобретен	
(заполняет	ся торгующей организацией, дата, подпись, штамп)
Введен в эксплуатацию	
	(дата подпись)
Принят на гарантийное обслуживание	
	(заполняется ремонтным предприятием)
подпись и печать	подпись и печать
руководителя	руководителя
ремонтного предприятия	учреждения владельца