

**КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ КН-1**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**  
**2055000000 ПС**



**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед включением, регулировкой и эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

**1. Назначение**

1.1. Ковать для новорожденных КН-1 предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Длина	800 ± 30 мм
Ширина	500 ± 20 мм
Высота	980 ± 30 мм
Масса	9,7 кг
Предельная рабочая нагрузка на кровать	12 кг
Углы наклона ванны-киюеты: - в сторону головы - в сторону ног	не менее 8° не менее 8°
Средний срок службы, не менее	5 лет

**ВНИМАНИЕ!**

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

**3. Комплектность**

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Кровать для новорождённых КН-1	1
<b>Съёмные части</b>		
2	Ванна-киюета	1
3	Матрац в чехле	1
<b>Эксплуатационная документация</b>		
4	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Акционерное общество  
 "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607 033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,  
 Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.  
 тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44  
 E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

#### 4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Кровать согласно рисунку 1 состоит из каркаса 1, поворотной опорной рамки 2, в которую вставляется ванна-ковчег 3 с матрасом 4. Каркас установлен на четыре колеса 5, два из которых с тормозами 6.

Ванна-ковчег выполнена из прозрачного органического стекла. В одном торце ванны-ковчег имеет карман 7 для именной таблички. Чехол матраса выполнен из клеенки с полихлорвиниловым покрытием на тканевой основе. Фиксация угла наклона ванны-ковчег, как в сторону головы ребенка, так и в сторону ног осуществляется бесступенчато при помощи зажимного винта 8.

4.2. Подготовка к работе:

- распакуйте кровать, очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом;
- проверьте комплектность;
- проверьте надежность резьбовых соединений и, при необходимости, подтяните их;
- произведите санитарную обработку кровати.

4.3. Для установки ванны-ковчег в нужное положение необходимо:

- придерживая рукой опорную рамку 2 с установленной в ней ванной-ковчег 3, ослабить винт 8;

- придать ванне-ковчегу необходимое положение и зажимным винтом 8 зафиксировать.

4.4. Затормаживание колес производится нажатием ногой на педаль тормоза 6.

Растормаживание колес производится нажатием на противоположное плечо педали тормоза 6, приведя в исходное положение педаль.

4.5. Не допускается подвергать ванну-ковчегу, панель для пеленания и каркас кровати ударам о твердые предметы.

4.6. Перед помещением ребенка в кровать, колеса должны быть заторможены.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование кровати с неисправными тормозами, с ванной-ковчегу, имеющей сколы и трещины.



1 - каркас; 2 - поворотная опорная рамка; 3 - ванна-ковчег; 4 - матрас;  
5 - колесо с поворотным кронштейном; 6 - тормоз колеса; 7 - карман; 8 - винт зажимной.

ООО Торговый Дом "ДЗМО" Сервис

**5. Техническое обслуживание**

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями; смазке раз в год подшипников колес любой консистентной смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке кровати.

5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кровати, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, трещин и сколов ванны-юветы, панели для пеленания, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

**6. Консервация**

6.1. Металлические детали кровати и съемных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

6.2. Кровать для новорожденных КН-1 подвергнуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-028-07614107-2005.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

**7. Сведения об утилизации**

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

**8. Транспортирование и хранение**

8.1. Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

8.2. Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

**9. Гарантийные обязательства**

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-028-07614107-2005.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

**10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится**

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.

10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.

10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

#### 11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

#### 12. Свидетельство о приемке

Кровать для новорожденных

КН-1

Наименование изделия

Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик



Место для  
голограммы

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования»  
 (далее – «Завод») в лице Генерального директора, (далее – «Лицо, подписывающее декларацию») заявляет, что Кровать акушерская КА-2 по ТУ 9452-020-07614107-2003 в комплектации со съемными частями: столешница для новорожденной, матрас выдвжной панели, матрас съемный и т.д. (далее – «Товар») соответствует требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с требованиями Федерального Закона № 4 от 18.03.2002 г. «О техническом регулировании».

в лице Генерального директора (далее – «Лицо, подписывающее декларацию») заявляет, что Кровать акушерская КА-2 по ТУ 9452-020-07614107-2003 в комплектации со съемными частями: столешница для новорожденной, матрас выдвжной панели, матрас съемный и т.д. (далее – «Товар») соответствует требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с требованиями Федерального Закона № 4 от 18.03.2002 г. «О техническом регулировании».

Серийный номер: КД ОКП 945210  
 (далее – «Серийный номер») соответствует требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с требованиями Федерального Закона № 4 от 18.03.2002 г. «О техническом регулировании».

Соблюдает требования ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4)  
 (далее – «Требования») соответствует требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с требованиями Федерального Закона № 4 от 18.03.2002 г. «О техническом регулировании».

Декларация принята на основании Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) Раз. № СДЭК ВУ.ОС36.К00210 от 03.12.2015 года, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, адрес: 107589, город Москва, улица Красноварская, дом 17. Регистрационный удостоверения №36 ФСТ 2010/07009 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/03548 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/01895 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06002 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/04099 от 12.11.2015 года, ФСТ 2011/10023 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06831 от 03.11.2015 года, ФСТ 2007/00071 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/11353 от 12.11.2015 года, ФСТ 2010/06001 от 12.11.2015 года, ФСТ 2010/06093 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/04080 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/04094 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06006 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06018 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06019 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06000 от 03.11.2015 года, ФСТ 2010/06007 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Дата отправки декларации: 11.12.2015  
 Декларация действительна до: 10.12.2018  
 М.П. Касторов Андрей Владимирович  
 (подпись, фамилия)

Сведения о достоверности декларации о соответствии  
 Регистрационный номер РОСС RU.0601.11M018. Орган по сертификации продукции ООО «ПромТест»  
 Адрес: 117279, Москва, ул. Рязанская, 95А, оф. 423  
 Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.МВ08.Д01690 от 11.12.2015  
 М.П. Дюгирева Татьяна Осиповна, заместитель руководителя с правом подписи  
 (подпись, фамилия, фамилия руководителя органа по сертификации)

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара: **КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-1**  
 Серийный номер: [ ]  
 Гарантийный срок: **24 месяца**  
 Дата производства: [ ]  
 со дня продажи

**Заполняет продающая организация**

Наименование продающей организации: [ ]  
 Дата продажи: [ ]  
 ФИО / Подпись: [ ]

**Заполняет покупатель**

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
 К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.  
 Наименование покупателя: [ ]  
 ФИО / Подпись: [ ]



## Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые произошли с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

## Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

## Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 03 ноября 2015 года № ФСР 2009/06531

На медицинское изделие  
Кровати для новорожденных КН-1 и КН-2 по ТУ 9452-028-07614107-2005

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель  
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

номер регистрационного досье № РД-8957/44548 от 22.10.2015

Вид медицинского изделия 247980

Классификационный код применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

приказом Росздравнадзора от 03 ноября 2015 года № 8044  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

0015362