



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»



ШТАТИВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭНДОСКОПОВ ПОСЛЕ
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПЕРЕДВИЖНОЙ

ШтЭ-01-«КРОНТ»

П А С П О Р Т
КРПФ.942819.1500 ПС



г. Химки
Московская область

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Штатив для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки передвижной ШтЭ-01-«КРОНТ» (далее по тексту «штатив») предназначен для использования в эндоскопических кабинетах и других отделениях лечебно-профилактических учреждений. Держатель эндоскопов штатива позволяет разместить до 4-х эндоскопов одновременно. Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/02959 от 06.06.2016 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штатив выполнен из облегченных металлических труб круглого сечения $\varnothing 22$ мм, покрытых порошковой химически стойкой краской. Поддоны штатива выполнены из полимерного материала: полипропилена.

2.2. Габаритные размеры штатива не более:

- длина опоры - 460 мм;
- ширина опоры - 455 мм;
- высота штатива над полом не менее:
 - максимальная - 1900 мм
 - минимальная - 1650 мм

2.3. Штатив имеет три положения по высоте. Фиксация производится при помощи винтового соединения.

2.4. Количество мест в держателе эндоскопов - 4.

2.5. Масса штатива не более 6 кг.

2.6. Максимальная нагрузка на держатель эндоскопов 8 кг.

2.7. Штатив оборудован поворотными колесными опорами с тормозом. Диаметр колес $\varnothing 50$ мм.

2.8. Наружные поверхности штатива устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей. Пластиковые поддоны выдерживают стерилизацию паровым методом (автоклавирование) при температуре $T=121$ °С.

2.9. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.10. Срок службы не менее 4 лет.

2.11. Штатив соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штатив поставляется в разобранном виде (по заказу может поставляться в собранном).

Металлические трубы рамной конструкции имеют маркировочные номера

Номера поставляемых крепежных комплектов, соответствуют номерам сборочных узлов.

Перечень элементов, входящих в крепежные комплекты, приведен в Таблице 2.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Маркировочный номер	Кол-во
1	Опора левая с колесом	310	2

2	Опора правая с колесом	311	2
3	Держатель эндоскопов четырехместный	-	1
4	Стяжка	119	2
5	Поперечина	204	1
6	Стойка нижняя	011	1
7	Стойка верхняя	012	1
8	Пластиковый поддон КДС-3	-	2
9	Комплект крепежный №1	-	1
10	Комплект крепежный №2	-	1
11	Комплект крепежный №3	-	1
12	Комплект крепежный №4	-	1
13	Паспорт	-	1
14	Маркировочная табличка (зав.№ и год выпуска)	-	1
15	Схема сборки	-	1
16	Упаковочный лист	-	1

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Штатив в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды -50 °С ÷ $+40$ °С;
- Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре $+25$ °С.

При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.

9.2. Штатив должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 °С до $+40$ °С и относительной влажности 80% при температуре $+25$ °С.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня изготовления штатива.

Адрес предприятия-изготовителя АО «КРОНТ-М»:

Россия, 141400, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1, тел. (495) 572-84-10,

факс (495)572-84-15. E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

Сервисный центр: телефон 8(985)861-30-56, E-mail: service@kront.com

Ред. 1

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (495) 500-48-84