

**Столик инструментальный манипуляционный  
из нержавеющей стали передвижной с двумя полками и двумя ящиками + дополнительная  
телескопическая полка  
СИЯ4 3-01 (2М-2дп)-«Электра»  
Паспорт  
МПЭЛ.942819.003-39П**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик инструментальный манипуляционный из нержавеющей стали передвижной с двумя полками и двумя ящиками + дополнительная телескопическая полка СИЯ4 3-01 (2М-2дп)-«Электра»	830x505x975÷1155* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	17

Столик СИЯ4 3-01 (2М-2дп)-«Электра» является модификацией базовой модели столика СИЯ4 3-01 - «Электра». Размер основной полки - 755x395 мм, размер ящика 335x315x60 мм. Внутренний размер телескопической полки 795x160мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 17 кг. При этом нагрузка на полку составляет 5 кг, на ящик 3 кг, на дополнительную телескопическую полку 1 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 75 мм, на котором располагаются две полки, два ящика и дополнительная телескопическая полка. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.** Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ.** Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИЯ4 3-01 (2М-2дп) - «Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

**Гарантийный талон**

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Столика инструментального СИЯ4 3-01 (2М-2дп) - «ЭЛЕКТРА» ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретен \_\_\_\_\_

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_

(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца