

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")**

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 г. № 01, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Телефон: +7(83177) 4-80-62. Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича  
 заявляет, что  
 Кресло гинекологическое КГ-6 по ТУ 9452-040-0761 и 107-007 и съемные части к нему: подколеники, упоры для рук, тазик, штатив для вливания, столик для инъекций, подставка для ног, секция ножная

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

Серийный выпуск

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")**

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение 001  
 Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон № 19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание 2б/5/1  
 Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402900000

**соответствует требованиям**  
 ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485:2017 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (в/тестирование аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.001).

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2007/00070 от 23.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

Дата принятия декларации **11.12.2018**  
 Декларация о соответствии действительна до **10.12.2023**

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

**А.В. Костров**

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  
 Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.  
 Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900  
 Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации **11.12.2018**, регистрационный номер декларации **РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00702/18**

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

**Ш.Н. Рузиева**

исполняет обязанности организации или лица, несущего ответственность за соответствие продукции требованиям стандартов

ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2007/00070 от 23.11.2015 г. ДС РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00702/18

**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6  
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)  
 КГ-6.000.000.000 РЭ**



Акционерное общество  
 "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,  
 Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.  
 тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44  
 E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

ООО "МедКомПТ"



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 ноября 2015 года № ФСР 2007/00070

На медицинское изделие

**Кресло гинекологическое КГ-6 по ТУ 9452-040-07614107-2007 и съемные части к нему: подколеники, упоры для рук, тазик, штатив для вливаний, столик для инъекций, подставка для ног, секция ножная.**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия

607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

№ документа регистрационного досье № РД-9037/44307 от 27.10.2015

Вид медицинского изделия 151550

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

приказом Росздравнадзора от 23 ноября 2015 года № 8670  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.  
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко



0015686





## Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



## Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



## Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
  - наименования товара;
  - даты ввода товара в эксплуатацию;
  - описания дефекта товара и характера неисправности;
  - обстоятельств выявления дефекта;
  - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



### Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед включением, регулировкой и эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

## 1. Назначение

1.1. Кресло гинекологическое КГ-6 (в дальнейшем - кресло) предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.

Кресло применяется в медицинских учреждениях.

Кресло изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в соответствии с требованиями ТУ 9452-040-07614107-2007.

Кресло соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 для изделий группы 1 класса В.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1.1. Кресло необходимо установить таким образом, чтобы при перемещении его частей исключить их контакт с другими предметами и оборудованием.

1.2. Необходимо проверить, совпадает ли напряжение сети с указанным в технических характеристиках, прежде чем подключать кресло к сети.

1.3. Силовой кабель подачи напряжения и кабель пульта управления могут быть повреждены, если на них надавят опоры или станина. Обращайте внимание на то, чтобы кабели не заземлялись под ними.

1.4. Во время регулировки положений кресла, в частности, при опускании и изменении углов наклона спинки и сиденья, могут быть защемлены части тела пациента.

Будьте осторожны при регулировке положений кресла.

1.5. Незафиксированный подколеник может смещаться, поэтому после регулировки надёжно закрепите его.

## 2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина ложа кресла при горизонтальном положении спинки и сиденья	1366 ± 10 мм
Ширина сиденья кресла	655 ± 10 мм
Высота сиденья кресла над полом: - минимальная - максимальная	650 ± 20 мм 950 ± 20 мм
Масса	101 кг
Предельная рабочая нагрузка на кресло	170 кг
Углы наклона от горизонтали, не менее: - спинки - сиденья	от -15° до +70° от 0° до +15°
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Мощность, потребляемая электрическим блоком, не более	300 ВА
По электробезопасности, в зависимости от степени защиты от поражения электрическим током	кресло относится к классу II, типу В по ГОСТ Р 50267.0-92
Привод подъёма и опускания сиденья	электромеханический
Привод наклона спинки и сиденья	электромеханический
Средний срок службы, не менее	5 лет

### ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

Таблица 2

Руководство и декларация изготовителя - помехозащита.		
Изделие КГ-6 предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь изделия КГ-6 должен обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.		
Испытания на помехозащиту	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Индустриальные радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11	Группа 1	Изделие КГ-6 использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
Индустриальные радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11	Класс А	Изделие КГ-6 пригодно для применения во всех местах размещения, иных, чем жилье дома и здания, непосредственно подключенное к распределительной электрической сети, питающей жилье дома.
Гармонические составляющие тока по ГОСТ Р 51317.3.2	Класс А ГОСТ Р 51317.3.2	
Колебания напряжения и фликер по ГОСТ Р 51217.3.3	Соответствует	

Таблица 3

Руководство и декларация изготовителя - помехозащита.			
Изделие КГ-6 предназначено для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь изделия КГ-6 должен обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.			
Испытания на помехоустойчивость	Испытательный уровень	Уровень соответствия требованиям помехоустойчивости	Электромагнитная обстановка - указания
1	2	3	4
Электростатические разряды (ЭСР) по ГОСТ Р 51317.4.2	± 6 кВ - контактный разряд; ± 8 кВ - воздушный разряд.	± 6 кВ - контактный разряд; ± 8 кВ - воздушный разряд.	Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30%.
Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4	± 2 кВ - для линий электропитания; ± 1 кВ - для линий ввода/выхода.	± 2 кВ - для линий электропитания; ± 1 кВ - для линий ввода/выхода.	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование  
товара**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КГ-6**

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

**12 месяцев**

со дня продажи

### Заполняет продающая организация

Наименование  
продающей  
организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

м.п.

### Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
К комплектации и внешнему виду  
товара претензий не имею.Наименование  
покупателя

ФИО / Подпись

м.п.



**12. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится**

- 12.1. Истечение гарантийного срока.  
 12.2. Нарушение правил эксплуатации товара.  
 12.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.  
 12.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.  
 12.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.  
 12.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

**13. Претензия к качеству в течение гарантийного срока**

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

**14. Свидетельство о приемке**

Кресло гинекологическое	КГ-6	
Наименование изделия	Обозначение	
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.		
Служба качества		
подпись		
расшифровка подписи		
число, месяц, год		
Сборщик / упаковщик		

1	2	3	4
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5	± 1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод"; ± 2 кВ - при подаче помех по схеме "провод-земля".	± 1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод"; ± 2 кВ - при подаче помех по схеме "провод-земля".	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки.
Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11	<5%Un (прерывание напряжения >95%Un) в течение 0,5 и 1 периода. 40%Un (провал напряжения 60%Un) в течение 5 периодов. 70%Un (провал напряжения 30%Un) в течение 25 периодов. 120%Un (выброс напряжения 20%Un) в течение 25 периодов. <5%Un (прерывание напряжения >95%Un) в течение 5с.	<5%Un (прерывание напряжения >95%Un) в течение 0,5 и 1 периода. 40%Un (провал напряжения 60%Un) в течение 5 периодов. 70%Un (провал напряжения 30%Un) в течение 25 периодов. 120%Un (выброс напряжения 20%Un) в течение 25 периодов. <5%Un (прерывание напряжения >95%Un) в течение 5с.	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю изделия требуется непрерывная работа в условиях возможных прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание изделия от батареи или источника бесперебойного питания.
Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648	3 А/м	3 А/м	Уровни магнитного поля промышленной частоты должны соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки.
Примечание: Un - уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.			

**3. Комплектность**

Таблицы 4

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Кресло гинекологическое КГ-6	1
<b>Съёмные части</b>		
2	Комплект мягких частей (спинка с подголовником - 1 шт., сиденье - 1 шт., подколеник - 2 шт.)	1
3	Чехол упора для рук (мягкая вставка -1 шт., чехол - 1 шт.)	2
4	Тазик	1
5	Пульт управления (ручной и ножной)	2
<b>Эксплуатационная документация</b>		
6	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

3.1. Дополнительные съемные части могут быть поставлены Заказчику по отдельному договору с заводом-изготовителем.

3.2. Перечень дополнительных съемных частей приведен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подголовник (ПУ №ФСР 2010/07066)	1
2	Подставка для ног (подножка)	1
3	Секция ножная	1
4	Столик для инъекций (поставляется с 2 направляющими)	1
5	Штатив для вливаний	1

#### 4. Устройство и принцип работы

4.1. Внешний вид кресла представлен на рисунке 1 настоящего руководства по эксплуатации (паспорта).

4.2. Кресло состоит из стойки и мягкого ложа.

4.3. Стойка состоит из основания 2 и защитного кожуха 3, в которой смонтированы привод подъема и опускания сиденья, привода для наклона спинки и сиденья, а также блок питания и управления. Основание установлено на четырех опорах 1 и двух колесах.

4.4. Мягкое ложе состоит из спинки 4 с подголовником 5 и сиденья 7.

Для закрепления подголовника на спинке используется лента "Репейник". Длина ремня регулируется по месту.

Подушка сиденья - съемные, подушка спинки - откидная. Подушки удерживаются на каркасе за счет направляющих ключей, расположенных на нижней плоскости основания подушек.

4.5. Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки и сиденья осуществляется путем нажатия кнопок на пульте управления согласно рисунку 3.

Пульт управления - съемный. В комплекте предусмотрен ножной пульт управления согласно рисунку 7.

4.6. В стандартном комплекте поставки кресло комплектуется подколениками 8, упорами для рук 6, тазиком 9.

Подколеники устанавливаются во втулки упоров для рук, кассета для тазика подвешивается на стержнях внутри каркаса спинки.

4.7. Подколеники 8 предназначены для размещения голени пациента и позволяют изменять положение ложа подколеника по углу и высоте.

Каждый подколеник снабжен ремнем, фиксирующим голень.

В конструкции кресла имеется функция синхронного регулирования подколеников. При этом необходимо расфиксировать нижние зажимы согласно рисунку 5.

4.8. Тазик 9 предназначен для сбора жидкостей.

Конструкция кассеты для тазика позволяет автоматически (под действием собственного веса) устанавливается горизонтально при любом угле наклона сиденья.

Тазик легко извлекается из кассеты для обработки и дезинфекции.

#### 7. Техническое обслуживание

7.1. Не реже одного раза в месяц производите осмотр кресла и, при необходимости, подтяжку крепежа.

7.2. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.



Перед чисткой и дезинфекцией кресла необходимо отключить его от электрической сети. Нельзя использовать химические чистящие средства и растворители, а также аэрозоли. Нельзя применять механические приспособления для чистки и дезинфекции.

#### 8. Консервация

8.1. Металлические детали кресла и съемных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

8.2. Кресло гинекологическое КГ-6 подвергнуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-040-07614107-2007.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

#### 9. Транспортирование и хранение

9.1. Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

9.2. Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9.3. Для перемещений кресла внутри помещений используются встроенные колесные опоры: приподнять кресло за раму сиденья (наклоните в сторону спинки) до отрыва от пола нерегулируемых и регулируемых опор и переместить его в нужное место.

При необходимости, отрегулировать опоры согласно п. 4.3.

9.4. Для перемещения кресла по порогам, лестницам и в другое помещение - обязательно полностью поднять кресло за раму основания, предназначенными для этого средствами достаточной грузоподъемности.



Запрещается подъем, наклон или переноска кресла за спинку, пластиковые элементы и съемные приспособления - это может привести к механическим повреждениям и потере гарантии производителя.

Также, запрещается вставать (сидеть) на спинку кресла и съемную ножную секцию.

#### 10. Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

#### 11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

11.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-040-07614107-2007.

11.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае

отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

11.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.





Рисунок 5

6.8. Установка тазика в cassette представлена на рисунке 6. Регулировка положения тазика происходит автоматически (под собственным весом) поворотом cassette на осях.


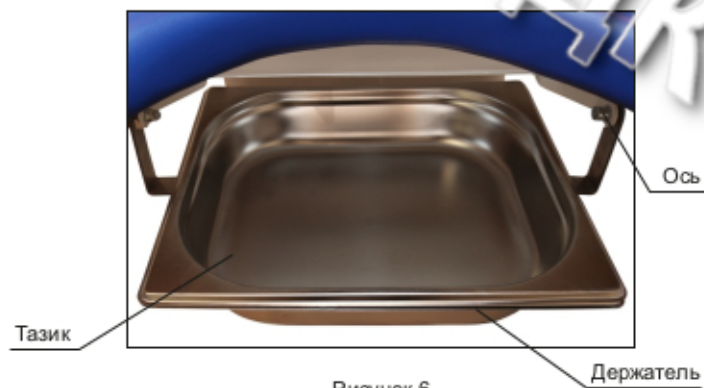


Рисунок 6

6.9. Ножной пульт управления креслом представлен на рисунке 7.

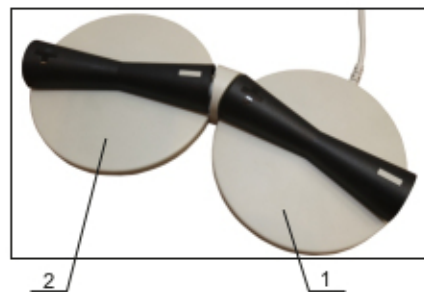

1 - педаль регулирования высоты подколенников;  
2 - педаль управления подъемом и опусканием сиденья.

Рисунок 7




1 - регулируемые опоры; 2 - раковина; 3 - защитный кожух; 4 - спинка;  
5 - подголовник; 6 - упор для руки; 7 - сиденье; 8 - подколенник;  
9 - тазик; 10 - пульт управления

Рисунок 1

## 5. Подготовка изделия к работе

- 5.1. Распаковать полученное кресло, ознакомиться с его устройством по руководству по эксплуатации (паспорту), протереть наружные поверхности кресла чистой ветошью.
- 5.2. Распаковать коробку с мягкими частями. Вкрутить ключи в резьбовые отверстия в спинке и в сиденье. Установить перемычку, зафиксировав ее на липкую ленту. Установить сиденье и спинку на кресло, совместив ключи с отверстиями на металлическом каркасе.
- 5.3. Установить чехол упора для рук - 2 шт. рис. 1. Для этого установить мягкую вставку на упор для рук швом внутрь. Натянуть чехол молнией внутрь. Зафиксировать молнией.
- 5.4. Перед использованием кресла проверить надежность его установки, при необходимости, отрегулировать положение опор 1 согласно рисунку 1.
- Для регулировки опоры отвернуть контргайку, установить опору в необходимое положение, завернуть контргайку.
- При поставке кресла на поддоне, отвернуть крепежные болты из основания кресла и взамен их установить опоры 2, отрегулировать их до достижения устойчивого положения кресла, законтрить опоры 2 контргайками M12 из комплекта опор согласно рисунку 2.
- Следить за тем, чтобы кабели подачи напряжения и пульта управления не находились под опорами.

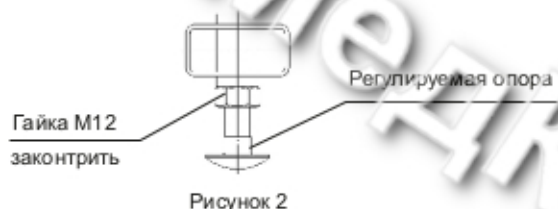


Установить кресло так, чтобы при перемещениях его частей исключить их контакт с другими предметами и оборудованием.  
Штепсельная вилка подключения кресла к сети должна быть в легкодоступном месте на случай аварийного отключения кресла.

- 5.4. Перед использованием кресла проверить наличие защитных кожухов на тумбе 3 основания согласно рисунку 1.
- 5.5. Включить вилку питания кресла в сеть 220 В.
- 5.6. Проверить работоспособность кресла путем управления с пульта 11, в соответствии с рисунком 1, приводами подъема и опускания кресла, наклона спинки и сиденья.
- 5.7. Установить подключение поз. 9 рисунок 1 в крепление подколеника и зафиксировать зажимом.

## 6. Использование изделия

- 6.1. Пульт управления креслом представлен на рисунке 3.

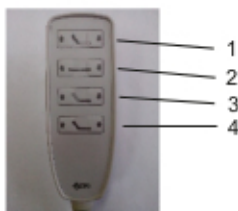

- 1 - кнопки управления углом наклона спинки;  
2 - кнопки управления подъемом и опусканием сиденья;  
3 - кнопки управления углом наклона сиденья  
4 - кнопки одновременного управления углами наклона спинки и сиденья.

Рисунок 3

- 6.2. Для подъема сиденья нажать на левую кнопку 2 ручного пульта управления согласно рисунку 3 или на левую педаль ножного пульта управления согласно рисунку 7 и удерживать ее до тех пор, пока сиденье не займет нужное положение.
- Для опускания сиденья нажать на правую кнопку 2 ручного пульта управления согласно рисунку 3 или на правую педаль ножного пульта управления согласно рисунку 7 и удерживать ее до тех пор, пока сиденье не займет нужное положение.

- 6.3. Для увеличения угла наклона сиденья нажать на левую кнопку 3 ручного пульта управления согласно рисунку 3
- Для уменьшения угла наклона сиденья нажать на правую кнопку 3 ручного пульта управления согласно рисунку 3
- 6.4. Для увеличения угла наклона спинки нажать на левую кнопку 1 ручного пульта управления согласно рисунку 3
- Для уменьшения угла наклона спинки нажать на правую кнопку 1 ручного пульта управления согласно рисунку 3
- 6.5. Для установки спинки и сиденья в положение "Тренделенбург" (наклон в сторону головы) установить спинку и сиденье в горизонтальное положение нажатием кнопок 1 и 3 ручного пульта управления согласно рисунку 3.
- 6.6. Варианты положений спинки и сиденья кресла, а также значения величин их возможных трансформаций представлены на рисунке 4.

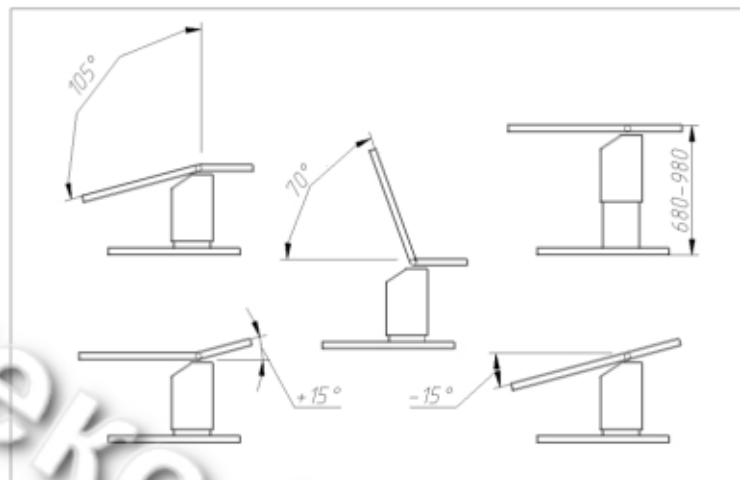


Рисунок 4



**Нельзя включать одновременно все моторы!**  
Необходима только индивидуальная работа.  
Допускается только одновременное включение приводов наклона спинки и сиденья без нагрузки.

- 6.7. Для регулировки подколеника ослабить крепление подколеника согласно рисунку 5, установить нужную высоту и положение подколеника, а затем затянуть нижний зажим.



Незафиксированный подколеник может смещаться.  
Закрепить его после регулировки.



№7.

Схема сборки.

Фурнитура.



8x

Детали.

1x



2x

1x




1x




2x




2x

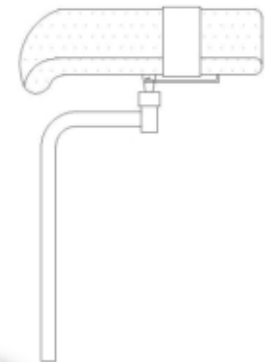

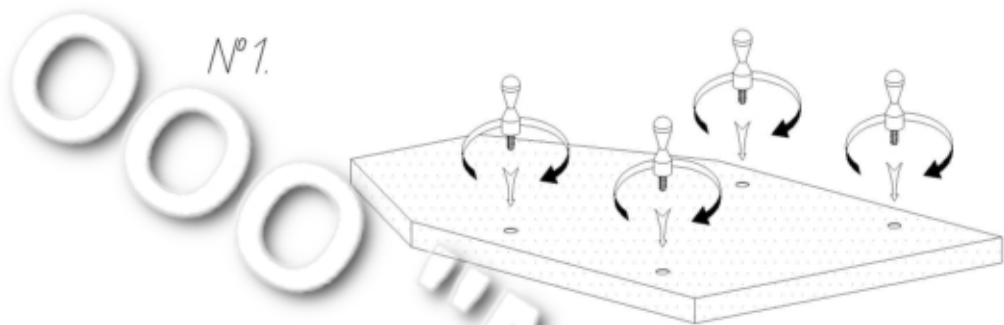


№1.


№2.

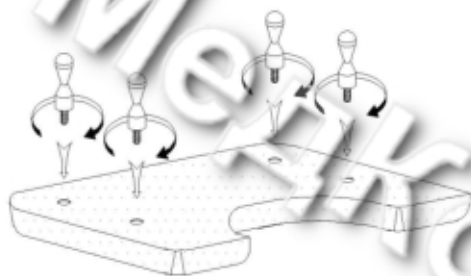


№3.

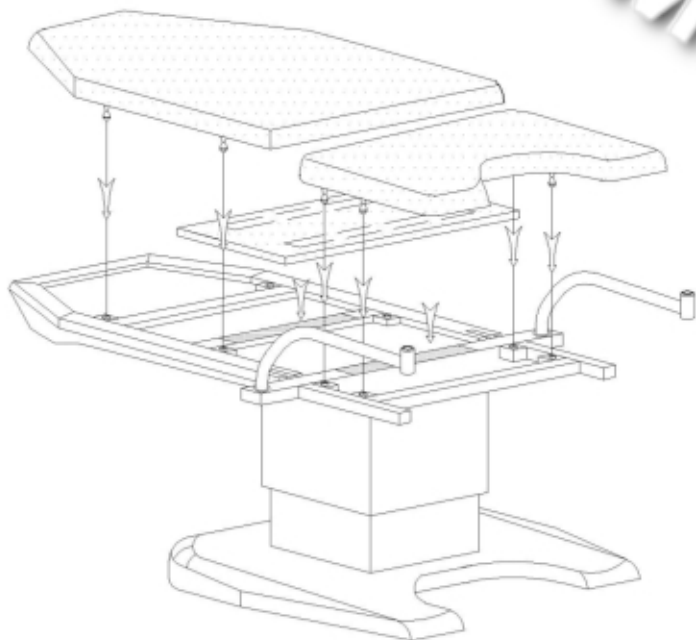

№4.

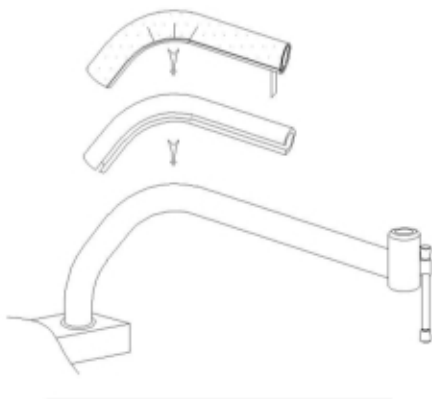

№6.

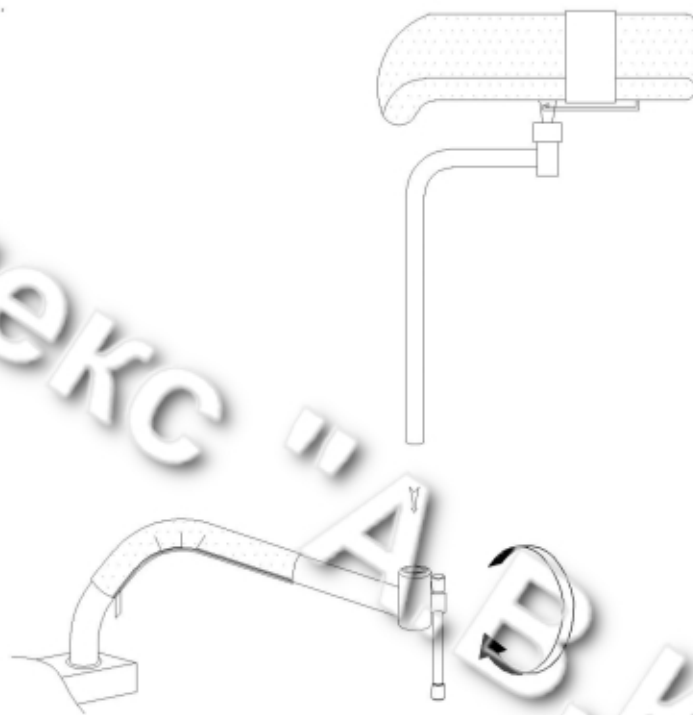

№5.

