

Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по
ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-03

Комплектность поставки

- 1 – верхняя часть с держателями – 1 шт.
- 2 – опора высокая – 1 шт.
- 3 – опора низкая – 2 шт.
- 4 – фиксатор – 1 шт.
- 5 – винт М6х65 с потайной головкой – 2 шт.
- 6 – гайка колпачковая М6 – 2 шт.



Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Соединить опору высокую (2) с двумя опорами низкими (3) с помощью двух винтов (5) и двух гаек (6).
3. Вставить фиксатор (4) в верхнюю часть с держателями (1). При этом ориентировать фиксатор так, как показано на увеличенном фрагменте рисунка.
4. Повернуть фиксатор (4) по часовой стрелке до упора с держателем верхней части (1).
5. Вставить верхнюю часть (1) в опору высокую (2).
6. Установить верхнюю часть (1) на нужную для процедур высоту. Зафиксировать это положение, повернув фиксатор (4) против часовой стрелки до упора с держателем верхней части (1).

Во время проведения процедур капельницу не передвигать!

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
2. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
4. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
5. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б
тел.: (812) 362-42-79

web: www.zavodmebel.ru


E-mail: info@zavodmebel.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по
ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-03

Комплектность поставки

- 1 – верхняя часть с держателями – 1 шт.
- 2 – опора высокая – 1 шт.
- 3 – опора низкая – 2 шт.
- 4 – фиксатор – 1 шт.
- 5 – винт М6х65 с потайной головкой – 2 шт.
- 6 – гайка колпачковая М6 – 2 шт.

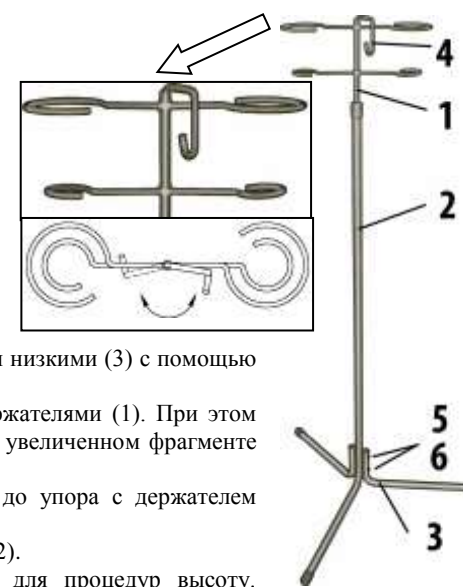

Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Соединить опору высокую (2) с двумя опорами низкими (3) с помощью двух винтов (5) и двух гаек (6).
3. Вставить фиксатор (4) в верхнюю часть с держателями (1). При этом ориентировать фиксатор так, как показано на увеличенном фрагменте рисунка.
4. Повернуть фиксатор (4) по часовой стрелке до упора с держателем верхней части (1).
5. Вставить верхнюю часть (1) в опору высокую (2).
6. Установить верхнюю часть (1) на нужную для процедур высоту. Зафиксировать это положение, повернув фиксатор (4) против часовой стрелки до упора с держателем верхней части (1).

Во время проведения процедур капельницу не передвигать!

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.

2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б
тел.: (812) 362-42-79

web: www.zavodmebel.ru

E-mail: info@zavodmebel.ru