

| | |
|---|---|
| При поставке в разобранном виде: | |
| 8.1 Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-2: | |
| -стойка-ручка ТКЭ с колесными опорами | 2 |
| -направляющая ТКЭ | 8 |
| -перемычка ТКЭ | 2 |
| -комплект крепежный №1 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -комплект крепежный №2 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -комплект крепежный №3 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -маркировочная табличка | 1 |
| 8.2. Паспорт | 1 |
| 8.3. Упаковочный лист | 1 |
| 9. Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-2 | |
| 9. 1 Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-2 | 1 |
| 9.2. Кнопка-фиксатор (красного цвета -4 шт. зеленого цвета – 4 шт.) компл. | 1 |
| 9.3. Паспорт | 1 |
| 9.4. Упаковочный лист | 1 |

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ» в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды -50 °С ÷ +40 °С;
 - Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25 С.
- При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.

9.2 Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ» должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Размер упаковочной тары Тележки с контейнерами (1180x220x570)±20 мм; тележки – не более 1200x140x590 мм; контейнера не более 620x500x180. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25 С.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.2 Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Адрес изготовителя: АО «КРОНТ-М»: 141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1. Тел/факс: (495)500-48-84 (многоканальный). E-mail:info@kront.com, Internet: www.kront.com.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРОНТ-М»

ТЕЛЕЖКА КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ И КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЭНДОСКОПОВ ТКЭ-4-«КРОНТ»

П А С П О Р Т
КРПФ.942819.8000ПС
Ред.3

г. Химки
Московская область

Внешний вид вариантов поставки




Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами (с лотками) для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1(1Л)(2)

Рис. 1



Контейнер (с лотком) для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1(1Л) (2)

Рис.3

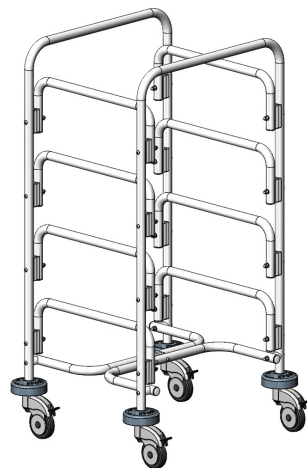

Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1(2)

Рис.2



Лоток- ЛЭ-«КРОНТ»-1

Рис.4

| | | |
|--|--|---|
| При поставке в разобранном виде: | | |
| 4.1. Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1: | | |
| -стойка-ручка ТКЭ с колесными опорами | | 2 |
| -направляющая ТКЭ | | 8 |
| -перемычка ТКЭ | | 2 |
| -комплект крепежный №1 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| -комплект крепежный №2 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| - крепежный №3 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| -маркировочная табличка. | | 1 |
| 4.2. Контейнер с лотком для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1Л | | 4 |
| 4.3. Кнопка-фиксатор (красного цвета - 16 шт. зеленого цвета – 16 шт.) компл. | | 1 |
| 4.4. Паспорт | | 1 |
| 4.5. Упаковочный лист | | 1 |
| 5. Контейнер с лотком для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1Л | | |
| 5.1. Контейнер с лотком для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1 | | 1 |
| 5.2. Лоток –ЛЭ-«КРОНТ»-1 | | 1 |
| 5.3. Кнопка-фиксатор (красного цвета -4 шт. зеленого цвета – 4 шт.)компл. | | 1 |
| 5.4. Паспорт | | 1 |
| 5.5. Упаковочный лист | | 1 |
| 6. Лоток –ЛЭ-«КРОНТ»-1 | | |
| 6.1 Лоток-ЛЭ-«КРОНТ»-1 | | 1 |
| 6.1 Паспорт | | 1 |
| 6.2 Упаковочный лист | | 1 |
| 7. Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-2 | | |
| 7.1 Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-2 | | 1 |
| 7.2. Паспорт | | 1 |
| 7.3. Упаковочный лист | | 1 |
| При поставке в разобранном виде: | | |
| 7.1. Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-2: | | |
| -стойка-ручка ТКЭ с колесными опорами | | 2 |
| -направляющая ТКЭ | | 8 |
| -перемычка ТКЭ | | 2 |
| -комплект крепежный №1 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| -комплект крепежный №2 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| - крепежный №3 с листом-перечнем элементов комплекта | | 1 |
| -маркировочная табличка. | | 1 |
| 7.2. Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-2 | | 4 |
| 7.3. Кнопка-фиксатор (красного цвета - 16 шт. зеленого цвета – 16 шт.) компл. | | 1 |
| 7.4. Паспорт | | 1 |
| 7.5. Упаковочный лист | | 1 |
| 8. Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-2 | | |
| 8. 1.Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-2 | | 1 |
| 8.2. Паспорт | | 1 |
| 8.3. Упаковочный лист | | |

| | |
|---|---|
| При поставке в разобранном виде: | |
| 1.1. Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1: | 2 |
| -стойка-ручка ТКЭ с колесными опорами | 8 |
| -направляющая ТКЭ | 2 |
| -перемычка ТКЭ | 1 |
| -комплект крепежный №1 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -комплект крепежный №2 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -крепежный №3 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -маркировочная табличка. | 1 |
| 1.2. Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1 | 4 |
| 1.3. Кнопка-фиксатор (красного цвета - 16 шт. зеленого цвета – 16 шт.) компл. | 1 |
| 1.4. Паспорт | 1 |
| 1.5. Упаковочный лист | 1 |
| 2. Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1 | |
| 2.1 Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1 | 1 |
| 2.2. Паспорт | 1 |
| 2.3. Упаковочный лист | |
| При поставке в разобранном виде: | |
| 2.1 Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1: | 2 |
| -стойка-ручка ТКЭ с колесными опорами | 8 |
| -направляющая ТКЭ | 2 |
| -перемычка ТКЭ | 1 |
| -комплект крепежный №1 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -комплект крепежный №2 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -комплект крепежный №3 с листом-перечнем элементов комплекта | 1 |
| -маркировочная табличка | 1 |
| 2.2. Паспорт | 1 |
| 2.3. Упаковочный лист | 1 |
| 3. Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1 | |
| 3.1 Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1 | 1 |
| 3.2. Кнопка-фиксатор (красного цвета -4 шт. зеленого цвета – 4 шт.) компл. | 1 |
| 3.3. Паспорт | 1 |
| 3.4. Упаковочный лист | 1 |
| 4. Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами с лотками для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1Л | |
| 4.1 Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами и лотками для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1Л | 1 |
| 4.2. Паспорт | 1 |
| 4.3. Упаковочный лист | 1 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-058-11769436-2016, в вариантах исполнения: ТКЭ-4-«КРОНТ»-1, ТКЭ-4-«КРОНТ»-2 и вариантах поставки:

- Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1;

- Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-1;

- Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1.

- Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами с лотками для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1Л;

- Контейнер с лотком для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-1Л;

- Лоток ЛЭ-«КРОНТ»- 1;

- Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-2;

- Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»-2;

- Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»-2.

Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»* (далее Тележка с контейнерами) предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнерах КЭ-«КРОНТ»* в структурных подразделениях медицинских организаций. В комплект поставки входят 4 контейнера.

Тележка контейнерная эндоскопическая ТКЭ-«КРОНТ»* (далее Тележка) предназначена для размещения и транспортировки контейнеров КЭ-«КРОНТ». При таком варианте поставки контейнеры приобретаются отдельно. Количество контейнеров, размещаемых на тележке, может варьироваться от 1 до 4-х.

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов КЭ-«КРОНТ»* (далее Контейнер) предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-«КРОНТ»* или для самостоятельного использования.

Лоток-ЛЭ-«КРОНТ»-1 предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнере КЭ-«КРОНТ»-1 или для самостоятельного использования.

Изделия разработаны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» и Методическими указаниями МУ

3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

Регистрационное удостоверение №РЗН2017/5690 от 16.06.2020г.

*информация относится к 1 и 2 вариантам исполнения

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики

Таблица 1

| Вариант поставки | Габаритные размеры, ±25 мм | Масса, не более, кг | Номинальная нагрузка |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| ТКЭ-4-«КРОНТ»-1 | 580x580x1015 | 20 | 40 |
| ТКЭ-4-«КРОНТ»-1 | 580x490x1015 | 11 | 40 |
| КЭ-«КРОНТ»-1 | 580x460x145 | 2,25 | 10 |
| ТКЭ-4-«КРОНТ»-2, | 580x490x1015 | 16 | 40 |
| ТКЭ-4-«КРОНТ»-2 | 490x490x1015 | 10 | 40 |
| КЭ-«КРОНТ»-2 | 580x375x145 | 2 | 10 |
| ТКЭ-4-«КРОНТ»-1Л, | 580x490x1015 | 20 | 40 |
| КЭ-«КРОНТ»-1Л | 580x460x145 | 2,25 | 10 |
| Лоток ЛЭ-«КРОНТ»-1 | 445x365x45 | 0,4 | 4 |

2.2 Усилие для перемещения Тележки с контейнерами не более 100 Н.

2.3 Усилие на педаль для включения тормоза колесной опоры не более 150 Н.

2.4 Покрyтия порошковое и порошковое антимикробное рамной конструкции тележки устойчивы к дезинфекции химическими средствами в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, например, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177. Обеззараживающая активность антимикробного покрытия не снижается при использовании средств на основе перекиси водорода, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и хлорактивных химических соединений.

2.5 Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, например, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне +10°C ÷ +70°C в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств.

2.6 Тележка с контейнерами при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ.4.2 по ГОСТ 15150.


2.7 Средний срок службы не менее 5 лет.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Рамная конструкция тележки выполнена из стальной трубы круглого сечения Ø22мм с порошковым покрытием или с порошковым антимикробным покрытием - см. раздел «Свидетельство о приемке».

3.2 Тележка оборудована поворотными колесными опорами Ø75 или Ø100 мм с эластичным ободом, имеющими тормоз, что позволяет при необходимости надежно фиксировать тележку.

3.3 Контейнер состоит из ванны и крышки, изготавливается из полимерных материалов (АБС пластика или полистирола). Крышка фиксируется на ванне с помощью двух сигнальных кнопок-фиксаторов красного или зеленого цвета. Цвет кнопки-фиксатора информирует медицинский персонал о состоянии эндоскопа: красный – контейнер с эндоскопом до обработки; зеленый – контейнер с эндоскопом, прошедшим обработку. Кнопка-фиксатор изготавливается из полимерного материала (пластиката поливинилхлоридного). В варианте поставки КЭ-«КРОНТ»-1Л в контейнер вкладывается лоток ЛЭ-«КРОНТ»-1.

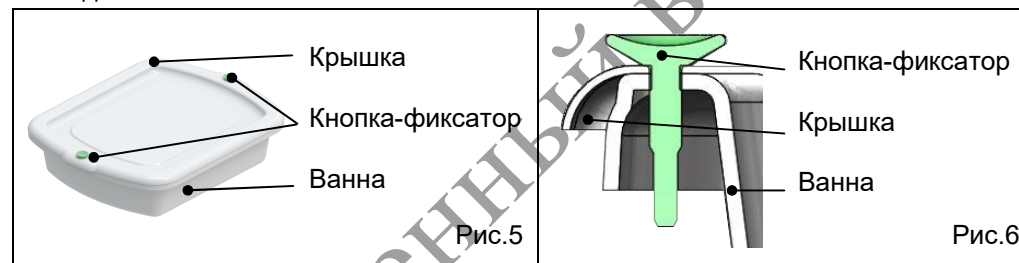

3.4 После каждого использования контейнер должен подвергаться дезинфекции.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие поставляется в разобранном виде (по заказу может поставляться в собранном виде).

4.1 Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| 1. Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1 | |
| 1.1. Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-«КРОНТ»-1 | 1 |
| 1.2. Паспорт | 1 |
| 1.3. Упаковочный лист | 1 |