

Подставка под тазы из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов

ПТбо 6,5-01 (2)-«Электра»

Паспорт

МПЭЛ.942819.002-03 П

НАЗНАЧЕНИЕ. Подставка под тазы из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТбо 6,5-01 (2)-«Электра» предназначена для размещения двух тазов по 6,5 л. Подставка выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Подставка под тазы из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТбо 6,5-01 (2)-«Электра»	685x480x810* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	3,9 без тазов

Подставка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 15 кг. Средний срок службы подставки должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Подставки представляют собой каркас на колесиках диаметром 50 мм, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагаются два тазы из нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте подставку и очистите ее от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию подставки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Подставка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готова к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр подставки на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения подставки	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие подставки ПТбо 6,5-01 (2)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-002-39548518-2003 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня передачи товара покупателю..

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставки под таз из нержавеющей стали передвижной, для больничных отходов

ПТбо 6,5-01 (2)-«Электра» ТУ 9452-002-39548518-2003

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретена _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введена в эксплуатацию _____

(дата подпись)

Принята на гарантийное обслуживание _____

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца