




**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ШМД-«МСК»:
МД-5509.00 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.НВ29.Н00501/21**

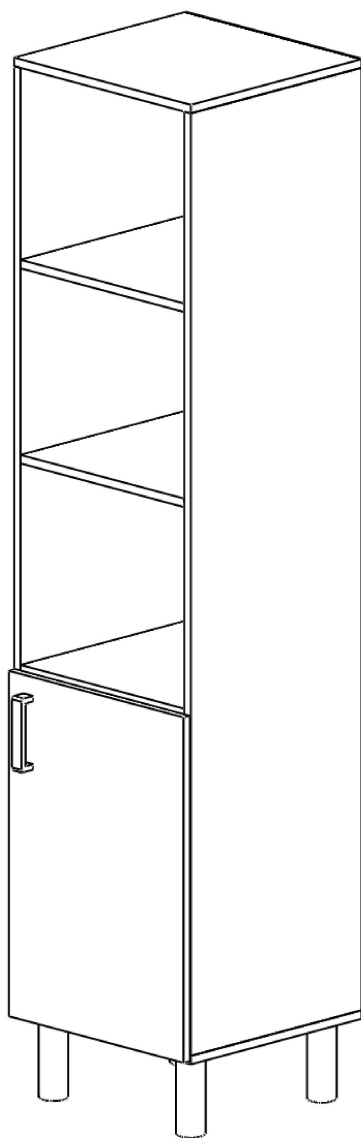

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Шкаф медицинский для хранения документации (далее по тексту — шкаф) предназначен для размещения и хранения документации, картотек, архивов в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.

1.2. Шкаф изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1. Основные параметры и размеры шкафа указаны в таблице:

| Наименование параметров | Значение параметров |
|---|-----------------------------|
| | ШМД - «МСК» (МД-5509.00) |
| 1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм | |
| Высота | 1950 |
| Ширина | 450 |
| Глубина | 460 |
| Высота регулируемой опоры, не менее, мм | 150 |
| 2. Масса, кг, не более | 35 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки шкафа соответствует указанному в таблице:

| № | Наименование комплектующего | Кол-во, шт. | Размер, мм |
|---|-----------------------------|-------------|------------|
| 1 | Стенка боковая правая | 1 | 1768x441 |
| 2 | Стенка боковая левая | 1 | 1768x441 |
| 3 | Дверь | 1 | 651x449 |
| 4 | Крышка | 1 | 452x441 |
| 5 | Дно | 1 | 452x441 |
| 6 | Стенка задняя | 1 | 1800x450 |
| 7 | Полка | 1 | 418x441 |
| 8 | Полка | 3 | 418x441 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Шкаф собран из элементов, выполненных из ламинированного ДСП, фасады МДФ.

4.2 Шкаф представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.3 Элементы шкафа закреплены друг относительно друга металлическими конфирматами и деревянными шкантами.

4.4 Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.

4.5 Двери навешиваются на цельнометаллических четырехшарнирных фиксирующих петлях.

4.6 Полки устанавливаются на конфирматах и на полкодержателях.

4.7 Задняя стенка из ДВП крепится с боковыми стенками из ЛДСП.

4.8 Ручка-скоба крепится к двери на винтах.

4.9 Шкаф имеет два отделения:

- нижнее — с полкой и дверью,

- верхнее — открытое с тремя полками.

4.10 Шкаф установлен на регулируемые опоры.

5. ФУРНИТУРА.

5.1 Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице:

| № | Наименование комплектующего | Кол-во, шт. |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | Конфирмат | 12 |
| 2 | Ключ шестигранный | 1 |
| 3 | Шкант 8x30 | 12 |
| 4 | Петля с доводчиком | 2 |
| 5 | Ручка-скоба большая | 1 |
| 6 | Шуруп 3,5x13 | 50 |
| 7 | Регулируемые опоры | 4 |
| 8 | Полкодержатель | 12 |
| 9 | Заглушка конфирмат | 12 |

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1 После транспортирования шкафов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.

6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Шкаф имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский для хранения документации ШМД- «МСК»: МД — 5509.00 из набора мебели медицинской _____

Дата выпуска _____

М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ (Хабибуллин Р.Р)


11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие техники _____
наименование и тип изделия


Дата выпуска _____

Схема сборки шкафа МД 5509.00

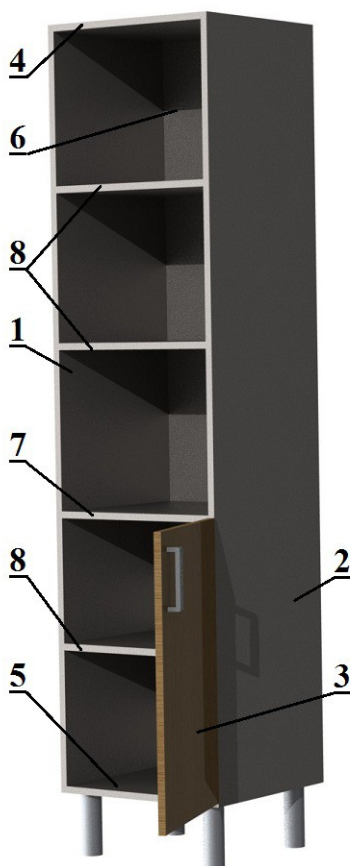

1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (4), полкой (7), дном (5).

2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (4) и дном (5).

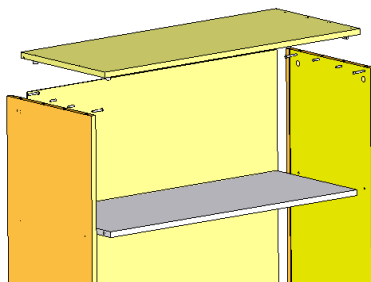

3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (8).

4. Прикрепить петли к двери(3) при помощи шурупов.

5. Прикрепить дверь (3) к боковым стенкам при помощи шурупов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

6. Используя винты на дверь (3) прикрепить ручку-скобу, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.