

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КРОВАТИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СЕРИИ КМ: ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ КМ ШДВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ КМ ШДВ (далее по тексту - штатив) предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания и выдвижной стойки с флаконодержателями и крючками для подвеса. Высота флаконодержателей устанавливается по средству фиксации выдвижной стойки ручкой фиксации .

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Штатив;
- набор фурнитуры;
- руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес , кг
КМ ШДВ	1190(1900*)x592x592	2,3
КМ ШДВ-1	1130(1810*)x592x592	2,3

*Максимальная высота штатива (с выдвинутой стойкой)

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

Штатив выдерживает нагрузку не более 5 кг.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штатив может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности не более 60%.

Штатив не требует специального технического обслуживания .

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Штатив можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штатива - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность подставки в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Штатив изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а. Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КРОВАТИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СЕРИИ КМ: ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ КМ ШДВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ КМ ШДВ (далее по тексту - штатив) предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания и выдвижной стойки с флаконодержателями и крючками для подвеса. Высота флаконодержателей устанавливается по средству фиксации выдвижной стойки ручкой фиксации .

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Штатив;
- набор фурнитуры;
- руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес , кг
КМ ШДВ	1190(1900*)x592x592	2,3
КМ ШДВ-1	1130(1810*)x592x592	2,3

*Максимальная высота штатива (с выдвинутой стойкой)

Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

Штатив выдерживает нагрузку не более 5 кг.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штатив может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности не более 60%.

Штатив не требует специального технического обслуживания .

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Штатив можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штатива - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность подставки в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Штатив изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а. Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____