




**ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТМ-«МСК»: МД-5103.00 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.НВ29.Н00501/21**

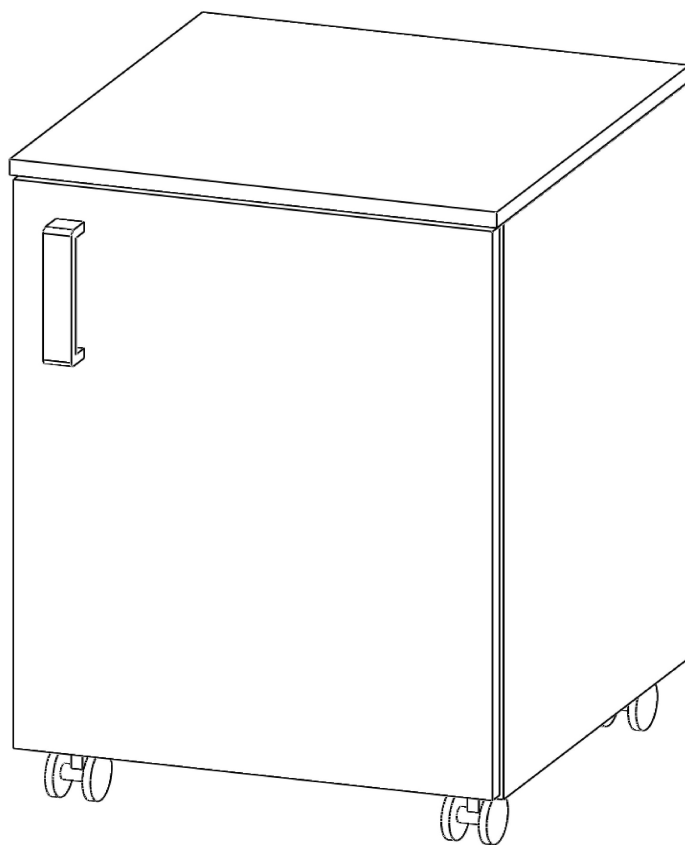

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Тумба медицинская(далее по тексту — тумба) предназначена для хранения личных вещей в палатах для больных, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях, в качестве подкатных к письменным столам.
- 1.2. Тумбы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.2. Основные параметры и размеры тумб указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	ТМ- «МСК»(МД-5103.00)
1. Габаритные размеры,±5 мм	
Глубина	450
Ширина	430
Высота	660
2. Масса, кг, не более	23

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки тумбы соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование	Количество, шт.	Размеры, мм
1	Стенка боковая	2	568x432
2	Дверь	1	581x426
3	Дно	1	432x432
4	Стенка задняя	1	568x398
5	Полка	1	398x415
6	Крышка	1	431x451

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Тумба собрана из элементов, выполненных из ламинированного ДСП и МДФ.
- 4.2. Тумбы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.
- 4.3. Элементы тумбы закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.
- 4.4. Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.
- 4.5. Тумба прикроватная подкатная, на мебельных колесах Ø50 мм, с дверью и полкой.
- 4.6. Полки устанавливаются на полкодержатели.

5. ФУРНИТУРА.

- 5.1. Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№ по з.	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
1	Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром	8
2	Шток	8
3	Шкант 8x30	12
4	Петля с доводчиком	2
5	Ручка-скоба	1
6	Шуруп 2А3-13 ГОСТ 1145-75	26
7	Заглушка эксцентрик	8
8	Колесо мебельное	4
9	Полкодержатель	4

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать тумбу и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.
- 6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Тумбы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Тумбы в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
- 8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
- 9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба медицинская ТМ- «МСК»: МД-5103.00 из набора мебели медицинской _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ (Хабибуллин Р.Р)


11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока


Изделие техники _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

Схема сборки тумбы МД-5103.00

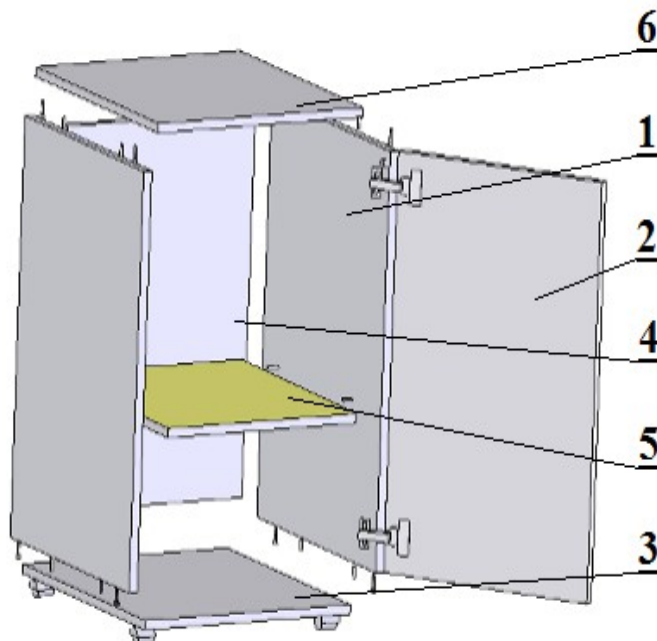

1. Прикрепить заднюю стенку (4) с боковыми стенками (1) при помощи шкантов.
2. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (1).

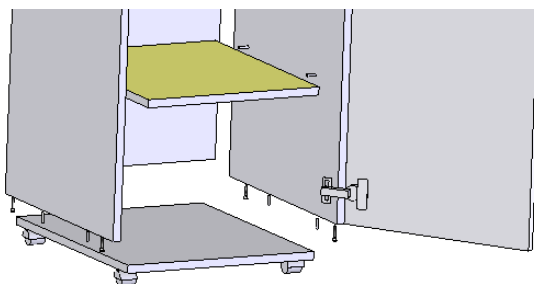

3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (6).
4. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полку (5).
5. С помощью петель навесить дверь (2), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Используя винты на дверь (2) прикрепить ручку, а снизу к дну (3) установить колеса.