

ОКП 94 5210

ПУ № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 г. ДС № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00731/18

**СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ СМ-1 "ДЗМО"  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)  
СМ-1.00.00 ПС**



Акционерное общество  
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,  
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.  
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44  
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.  
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

**1. Назначение**

1.1. Стул медицинский СМ-1 "ДЗМО" (в дальнейшем - стул) предназначен для оснащения медицинских кабинетов. Стул изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614 107-2012.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Диаметр сиденья	360 ± 50 мм
Высота сиденья над полом: - минимальная	470 ± 50 мм
- максимальная	600 ± 50 мм
Масса, не более	12 кг*
Предельная рабочая нагрузка на табурет, не более	130 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет
* Фактическая масса	7,4 кг

**ВНИМАНИЕ!**

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

**3. Комплектность**

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Стул медицинский СМ-1 "ДЗМО"	1
<b>Эксплуатационная документация</b>		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

**Примечание:**

При поставке стула в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

3.1. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подставка для ног	1

**4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности**

4.1. Стул согласно изображению на обложке настоящего руководства по эксплуатации (паспорта) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья и спинки, обтянутых винилискожей, опорной дуги спинки в защитном гофрированном чехле.

4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать стул и очистить его упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку притиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, провести техническое обслуживание согласно раздела 5. Выполнить санитарную обработку стула.

4.3. В случае поставки стула в разобранном виде провести его сборку следующим образом:

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминккорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Телефон: +7(83177) 4-80-62, Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

заявляет, что Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 в составе:

- подставка для тазов, ПТ-"ДЗМО",
- подставка для стерилизационных коробок (биксов), ПСК-"ДЗМО",
- столик для забора крови, СЗК-"ДЗМО",
- стул медицинский, СМ-1 "ДЗМО",
- табурет медицинский, ТМ-1 "ДЗМО".

Принадлежности:  
- подставка для ног,  
- газовая пружина

Серийный выпуск

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминккорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминккорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проминккорайон №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402 90 000 0

соответствует требованиям  
ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСС.001).

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Действительна с 11.12.2018

До окончания срока действия действительна до 10.12.2023

М.П.

А.В. Костров

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900

Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации: 11.12.2018, регистрационный номер декларации РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00731/18

М.П.

П.Н. Рязина

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2015 года № ФСР 2012/14093

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор медицинской мебели для процедурного кабинета**  
по ТУ 9452-060-07614107-2012 в составе:

- подставка для тазов, ПТ-"ДЗМО",
- подставка для стерилизационных коробок (биксов), ПСК-"ДЗМО"
- столик для забора крови, СЗК-"ДЗМО",
- стул медицинский, СМ-1 "ДЗМО",
- табурет медицинский, ТМ-1 "ДЗМО".

Принадлежности:

- подставка для ног,
- газовая пружина.

М

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0015268

- 4.3.1. Вкрутить до упора в лучину основания самоориентирующиеся колёса.  
4.3.2. Установить газ-лифт в основание.  
4.3.3. Вставить опорную дугу в защитный гофрированный чехол, плоской частью чехла в сторону спинки.  
4.3.4. Закрепить спинку к опорной дуге через кронштейн со скобой спинки, используя по 2 шт. - Винт М6 х 25, Шайба А.6.  
Спинка должна качаться свободно на опорной дуге.  
4.3.5. Вставить опорную дугу в защитном гофрированном чехле в сборе со спинкой в основание с нажимной ручкой и закрепить зажимным винтом.  
4.3.6. Закрепить к сиденью основание с нажимной ручкой в сборе со спинкой, используя по 4 шт. - Винт М6 х 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.  
4.3.7. Установить на газ-лифт сиденье в сборе со спинкой в отверстие основания с нажимной ручкой.
- 4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- 4.4.1. Эксплуатация неисправного стула. Во избежание падения, нельзя вставать на сиденье и не использовать не по прямому назначению.  
4.4.2. Самостоятельный ремонт стула неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.  
4.4.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов стула во избежание получения травм и увечий.

#### 5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных; смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колёс, любой консистентной технической смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке стула.  
5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования стула, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надёжность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс, надёжность фиксации газ-лифта в любом положении.  
5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

#### 6. Консервация

- 6.1. Металлические детали стула должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).  
6.2. Стул медицинский СМ-1 "ДЗМО" подвергнут в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

#### 7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование стула должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.  
7.2. Стул должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.  
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

#### 8. Сведения об утилизации

Поскольку стул не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

## 9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

## 10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

## 11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 12 ноября 2015 года № ФСР 2012/14093

На медицинское изделие  
Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов  
по ТУ 9452-060-07614107-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель  
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
(АО "ДЗМО"), Россия,  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия  
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,  
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье № РД-9158/44315 от 06.11.2015

Вид медицинского изделия 15/990

Класс потенциального риска при лечении медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 8429  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0015606



### Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



### Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



### Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
  - наименования товара;
  - даты ввода товара в эксплуатацию;
  - описания дефекта товара и характера неисправности;
  - обстоятельств выявления дефекта;
  - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru).

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

## 12. Свидетельство о приемке

Стул медицинский  
Наименование изделия

СМ-1 "ДЗМО"  
Обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества



\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

число, месяц, год



Сборщик / упаковщик



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование  
товара

СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ СМ-1 "ДЗМО"

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

12 месяцев

со дня продажи

### Заполняет продающая организация

Наименование  
продающей  
организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

м.п.

### Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
К комплектации и внешнему виду  
товара претензий не имею.

Наименование  
покупателя

ФИО / Подпись

м.п.

