

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Универсальный зажим (далее — зажим) предназначен для установки дополнительных приспособлений на столах операционных универсальных СОу - «МСК», изготовленных по ТУ 9452-027-52962725-2008.
1.2. Зажим изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
2.1.1. Габаритные размеры кронштейна зажима $\phi 50 \times 45$ мм;
2.1.2. Размеры паза для крепления на рейку операционного стола 25x10 мм;
2.1.3. Диаметр отверстия для установки дополнительных приспособлений 16 мм.
2.2. Характеристики:
2.2.1. Детали зажима изготовлены из нержавеющей стали.
2.2.2. Поверхность зажима устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 3.1. Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Кронштейн зажима	1
2	Резьбовой фиксатор	2
5	Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Универсальный зажим состоит из кронштейна и двух резьбовых фиксаторов.
4.2. Универсальный зажим устанавливается на боковую рейку операционного стола и фиксируется на ней резьбовым фиксатором.
4.3. Дополнительное приспособление устанавливается в отверстие $\phi 16$ мм кронштейна и крепится резьбовым фиксатором.

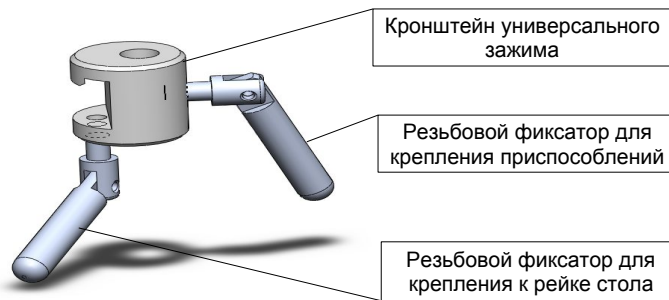

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К сборке и эксплуатации универсального зажима допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
6.2. Распаковать изделие и проверить целостность деталей.
6.3. Проверить комплектность.
6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:
- установить универсальный зажим на боковую рейку операционного стола и зафиксировать;
- установить в зажим необходимое приспособление и зафиксировать на необходимой высоте;

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Универсальный зажим не требует специального технического обслуживания.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
9.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Универсальный зажим МСК-629/10 _____
Дата выпуска _____ М. П.
Соответствует ТУ 9452-027-52962725-2009 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____ Наименование изделия _____

_____ Номер ГОСТ или ТУ _____

Номер и дата выпуска _____

Приобретено _____ Дата, подпись, штамп торгующей организации _____

Производитель: ООО «Медстальконструкция»
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00