

**Подставка под таз из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов**

**ПТ БО 9-01 -«Электра»**

**Паспорт**

**МПЭЛ.942819.002-04 П**

**НАЗНАЧЕНИЕ.** Подставка под таз из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО 9-01 - «Электра» предназначена для размещения таза 9-11 л. Подставка выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Подставка под таз из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО 9-01 -«Электра»	425x425x585* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	2,3 без таза

Подставка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 15 кг. Средний срок службы подставки должен быть не менее 8 лет.

**УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.** Подставки представляют собой каркас на колесиках диаметром 50 мм, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается таз из нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.** Распакуйте подставку и очистите ее от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию подставки дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ.** Подставка поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готова к эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр подставки на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения подставки	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

**ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.**

Изготовитель гарантирует соответствие подставки ПТ БО 9-01 -«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-002-39548518-03 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

**Гарантийный талон**

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставки под таз из нержавеющей стали передвижной, для больничных отходов

**ПТ БО 9-01 -«Электра»** ТУ 9452-002-39548518-03

Заводской номер: б/н. Дата выпуска:

Приобретена \_\_\_\_\_

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введена в эксплуатацию \_\_\_\_\_

(дата подпись)

Принята на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_

(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца