

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____
ТУ ВУ 800017554.036-2006

Приобретена _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия


Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ТУ1

ТУ ВУ 800017554.036-2006

Паспорт
БИПЯ.324422.036 ТУ1 ПС

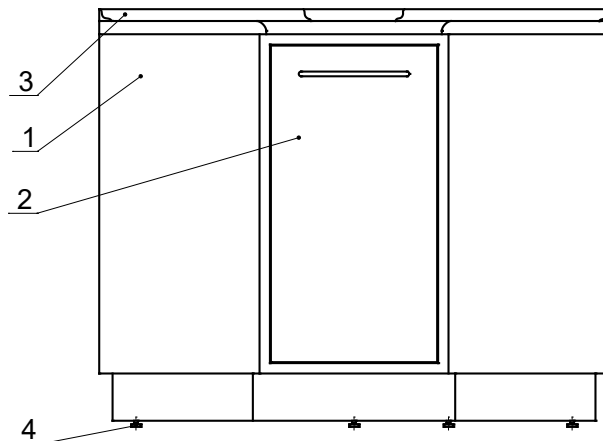

1. Корпус
2. Распашная дверь
3. Столешница
4. Опоры

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба угловая напольная ТУ1 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	1080
ширина.....	800
высота.....	860
2.2 Масса, кг, не более.....	57
2.3 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг.....	5±0,5
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг.....	5±0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба.....	1 шт.;
паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2; столешницы 3 и опор 4. Корпус тумбы изготовлен из тонколистовой стали, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг толщиной 28 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющими на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояние после транспортирования и хранения. Отрегулируйте высоту тумбы с помощью опор 4.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1 В процессе эксплуатации периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п.