

ОКП 94 5210

ПУ № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 г. ДС № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00731/18

**ТАБУРЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ТМ-1 "ДЗМО"
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
ТМ-1.00.00 ПС**



Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Табурет медицинский ТМ-1 "ДЗМО" (в дальнейшем - табурет) предназначен для оснащения медицинских кабинетов. Табурет изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614 107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Диаметр сиденья	360 ± 50 мм
Высота сиденья над полом:	
- минимальная	470 ± 50 мм
- максимальная	600 ± 50 мм
Масса, не более	7,5 кг
Предельная рабочая нагрузка на табурет, не более	130 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет
* Фактическая масса	4,6 кг

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Табурет медицинский ТМ-1 "ДЗМО"	1
Эксплуатационная документация		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

При поставке табурета в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

3.1. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подставка для ног	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

- 4.1. Табурет согласно изображению на обложке настоящего руководства по эксплуатации (паспорта) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья, обтянутого винилискожей.
- 4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать табурет и очистить его от упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку притиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, провести техническое обслуживание согласно раздела 5. Выполнить санитарную обработку табурета.
- 4.3. В случае поставки табурета в разобранном виде проведите его сборку следующим образом:
- 4.3.1. Вкрутить до упора в лучину основания самоориентирующиеся колёса.
- 4.3.2. Установить газ-лифт в основание.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.05.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Телефон: +7(83177) 4-80-62, Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

заявляет, что Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 в составе:

- подставка для газом, ПТ-"ДЗМО",
- подставка для стерилизационных коробок (биксов), ПСК-"ДЗМО",
- столик для забора крови, СЗК-"ДЗМО",
- стул медицинский, СМ-1 "ДЗМО",
- табурет медицинский, ТМ-1 "ДЗМО".

Принадлежности:
- подставка для ног,
- газовая пружина

Серийный выпуск

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание 1, помещение № 001

Адрес производства: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9402 90 00 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) № РСК.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.001).

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Дата вступления в силу: 11.12.2018

Декларация о соответствии действительна до 10.12.2023



А.В. Костров

Свидетельство о регистрации декларации о соответствии
Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, стр. 500

Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ82 выдан в соответствии с Федеральным законом от 04.09.2015 года, выдан Федеральным службой по аккредитации

Дата регистрации: 11.12.2018 - регистрационный номер декларации: РОСС RU.ДЗМО.АГ82.В.00731/18



И.Н. Рудник

М.П. (Official stamp of the company)



4.3.3. Основание с нажимной рукояткой закрепите к сиденью, используя по 4 штуки - Винт М6 x 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.

4.3.4. Установить на газ-лифт сиденье в отверстие основания с нажимной рукояткой.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.4.1. Эксплуатация неисправного табурета. Во избежание падения, не вставляйте на сиденье и не используйте не по прямому назначению.

4.4.2. Самостоятельный ремонт табурета неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.

4.4.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов табурета во избежание получения травм и увечий.

5. Техническое обслуживание

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных; смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колёс, любой консистентной технической смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке табурета.

5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования табурета, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс, надёжность фиксации газ-лифта в любом положении.

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали табурета должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

6.2. Табурет медицинский ТМ-1 "ДЗМО" подвергнут в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование табурета должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Табурет должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку табурет не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Табулет медицинский	TM-1 "ДЗМО"	
Наименование изделия	Обозначение	

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества		

подпись		

расшифровка подписи		

число, месяц, год		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 12 ноября 2015 года № ФСП 2012/14093

На медицинское изделие
**Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов
по ТУ 9452-060-07614107-2012**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье № РД-9158/44315 от 06.11.2015

Вид медицинского изделия 156900

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 422
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0015606



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



"Меджкомплекс" "А.В.К."



Место для
голограммы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы
производителя

Наименование товара	ТАБУРЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ТМ-1 "ДЗМО"		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	12 месяцев	со дня продажи	

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование покупателя		
ФИО / Подпись		

