




**ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ ТМ-«МСК»: МД-5104.00 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.НВ29.Н00501/21**

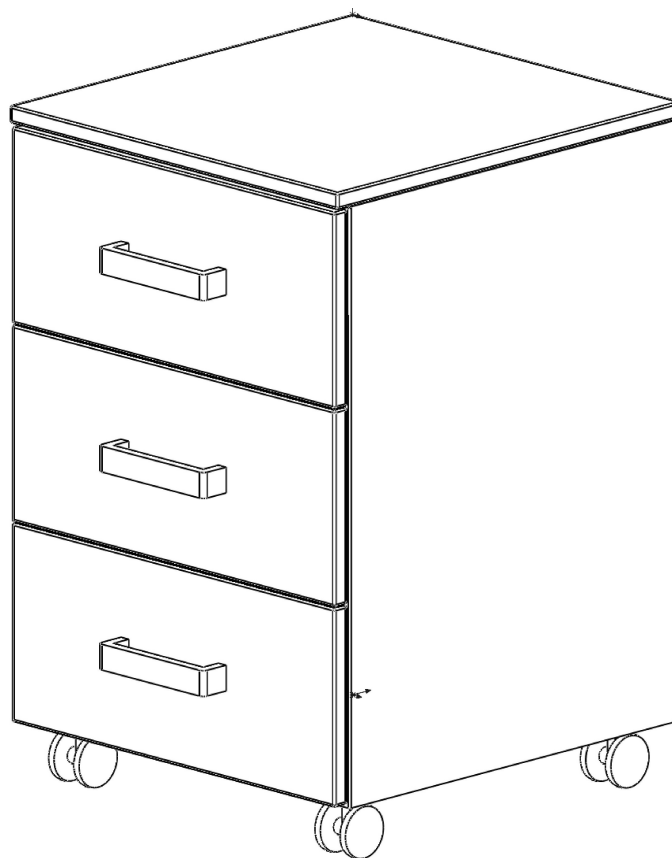

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Тумба медицинская (далее по тексту — тумба) предназначена для хранения личных вещей в палатах для больных, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях, в качестве подкатных к письменным столам.

1.2 Тумбы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры.

2.2. Основные параметры и размеры тумб указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	ТМ- «МСК» (МД-5104.00)
1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм	
Глубина	450
Ширина	430
Высота	660
2. Масса, кг, не более	26

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки тумбы соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.	Размер, мм
1	Ящик	3	
1.1	Панель лицевая	1	191x428
1.2	Боковина	2	390x141
1.3	Донышко	1	372x411
1.4	Панель задняя	1	372x141
2	Дно	1	432x432
3	Стенка боковая	2	568x432
4	Стенка задняя	1	568x398
5	Крышка	1	431x451

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Тумба собрана из элементов, выполненных из ламинированного ДСП и МДФ.

4.2. Тумбы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.3. Элементы тумбы закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.

4.4. Тумба подкатная, на мебельных колесах Ø50 мм, имеет три выдвижных ящика.

4.5. Ящики тумбы устанавливаются на направляющих.

5. ФУРНИТУРА.

5.1. Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
1	Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром	20
2	Шток	20
3	Шкант 8x30	36
4	Ручка-скоба большая	3
5	Шуруп 3.5x13	58
7	Ключ шестигранный	1
9	Заглушка эксцентрик	20
10	Колесо мебельное	4
11	Комплект направляющих	3

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать тумбу и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.
- 6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Тумбы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Тумбы в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
- 8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
- 9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ

Тумба медицинская ТМ- «МСК»: МД-5104.00 из набора мебели медицинской _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ (Хабибуллин Р.Р)

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока


Изделие техники _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

Схема сборки тумбы МД-5104.00



1. Скрепить заднюю стенку (4) с боковыми стенками (3) при помощи шкантов.
2. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).

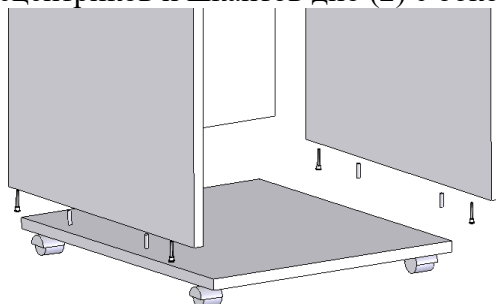

3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).
4. Собрать ящики:
 - при помощи стяжек-эксцентров и шкантов прикрепить боковины (1.2) к панелям лицевым (1.1),
 - при помощи стяжек-эксцентров и шкантов прикрепить панели задние (1.4) к боковинам (1.2),
 - вставить доньшки (1.3) в пазы панелей лицевых (1.1), прикрепить к стенке задней при помощи шурупов,
 - при помощи шурупов прикрепить детали направляющих к боковинам (1.2).
5. При помощи шурупов прикрепить детали направляющих к боковым стенкам (3) и установить собранные ящики (1)
6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) при помощи шурупов установить колеса.