

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-040-16789225-2018 тип М192-02

#### Комплектность поставки

- Вершина – 1 шт. (поз. 1)
- Звено – 4 шт. (поз. 2)
- Опора – 1 шт. (поз. 3)
- Сумка-чехол – 1 шт.



Поз. 1



Поз. 2



Поз. 3

#### Инструкция по сборке капельницы

- Освободить все комплектующие от упаковки.
- Установить опору на пол (см. рис. 1).
- Сверху одеть 4 звена и вершину (см. рис. 2)
- Взявшись за крючки вершины, придерживая (ногой) опору, повернуть звенья капельницы в любую сторону до

**Во время проведения процедур  
капельницу не передвигать!**



Рис. 1


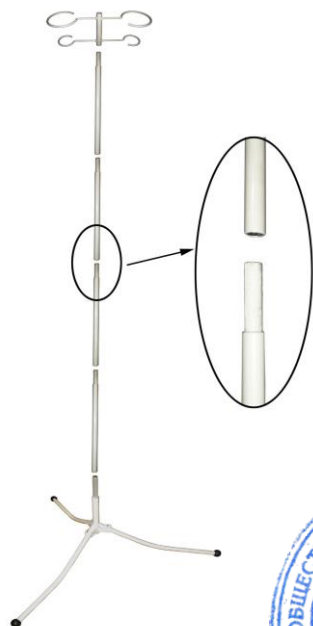


Рис. 2

все  
упора.

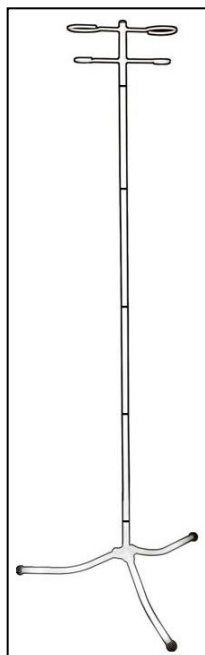

#### Правила по эксплуатации мебели

- Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
- Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

- Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за тканью (кожей)

- Обычные очистительные химические средства могут повредить ткань (кожу).
- Для выведения пятен с поверхности ткани следует использовать моющие средства на основе воды или легкие стиральные порошки.
- Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
- Время от времени кожу следует протирать сырой тряпкой или губкой.
- Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на ткань (кожу) светлых тонов.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.  
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.  
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.  
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.



ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б  
тел.: (812) 362-42-79  
web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)  
E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)