

## 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Тумба с распашной дверью ТО1 (прикроватная, опоры, колеса)

заводской номер \_\_\_\_\_ ТУ ВУ 800017554.036-2006

Приобретена \_\_\_\_\_

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию \_\_\_\_\_

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием \_\_\_\_\_

города \_\_\_\_\_

Подпись и печать  
руководителя ремонтного  
предприятия


Подпись и печать  
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

## ТУМБА С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ ТО1 (прикроватная, опоры, колеса)

ТУ ВУ 800017554.036-2006

Паспорт  
ТО1.1.00.000(04) ПС

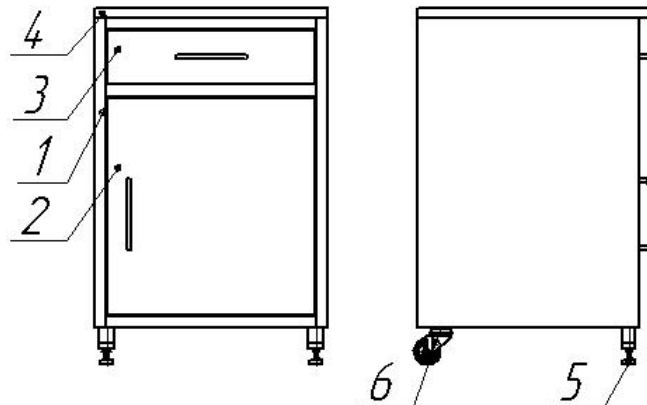

1. Корпус
2. Распашная дверь
3. Выдвижной ящик

4. Столешница
5. Опоры
6. Колеса

Рисунок

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба с распашной дверью ТО1 (прикроватная, опоры, колеса) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	445
ширина.....	445
высота.....	670
2.2 Масса, кг, не более.....	25
2.3 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг.....	25±1
2.4 Допускаемая нагрузка на ящик и полку, кг.....	5±0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее.....	5

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба .....	1 шт.;
паспорт .....	1 шт.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Тумба (см. рис. 1) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2 и выдвижным ящиком 3; столешницы 4; двух регулируемых опор 5 и двух колес 6.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющими на качество изделия.

## 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

5.2 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

5.3 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата).

## 6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Появление люфтов в конструкции	Ослабло крепление узлов	Подтянуть болты и другие крепежные детали

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с распашной дверью ТО1, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.036-2006 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 06.2021г.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с распашной дверью ТО1, заводской номер \_\_\_\_\_ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки 06.2021г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ м.п.