

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Фиксаторы для рук (далее — фиксатор) предназначен для фиксации руки пациента при проведении операций и процедур на столах операционных универсальных СОу - «МСК», изготовленных по ТУ 9452-027-52962725-2008.  
1.2. Фиксатор изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.  
2.1.1. Основные параметры и размеры фиксатора указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
	МСК-629/5
1. Габаритные размеры кронштейна, мм	185x70x23
2. Длина ремня в развертке, мм	560
3. Ширина ремня, мм	50
4. Масса комплекта (две шт.), кг, не более:	1,5

**2.2. Характеристики:**

- 2.2.1. Кронштейн фиксатора и резьбовой фиксатор изготовлены из нержавеющей стали, ремень — синтетический с застежкой-липучкой.  
2.2.2. Поверхность фиксатора устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки фиксатора руки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Кронштейн фиксатора с ремнем и резьбовым фиксатором	2
2	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Все металлические детали фиксатора изготовлены из нержавеющей стали, ремень — синтетический, регулируемый по длине при помощи застежки-липучки.  
4.2. Кронштейн фиксатора имеет резьбовой фиксатор для крепления к рейке операционного стола и позволяющий регулировать положение фиксатора вдоль панели стола.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации фиксатора допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
6.2. Распаковать изделие и проверить целостность деталей.  
6.3. Проверить комплектность.

- 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции:

- установить фиксатор на рейку операционного стола и зафиксировать;

- установить требуемую длину ремня при помощи застежки-липучки.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Фиксатор руки не требует специального технического обслуживания.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

- 9.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фиксатора руки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

- 10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Фиксаторы для рук(пара) МСК-629/5 \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Соответствуют ТУ 9452-027-52962725-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

М. П.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

Дата, подпись, штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

