




**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ВРАЧА СМВ-«МСК»:**  
**МСК-5602.М, МСК-5602.М.01 из набора мебели медицинской**  
**ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.НВ29.Н00501/21**

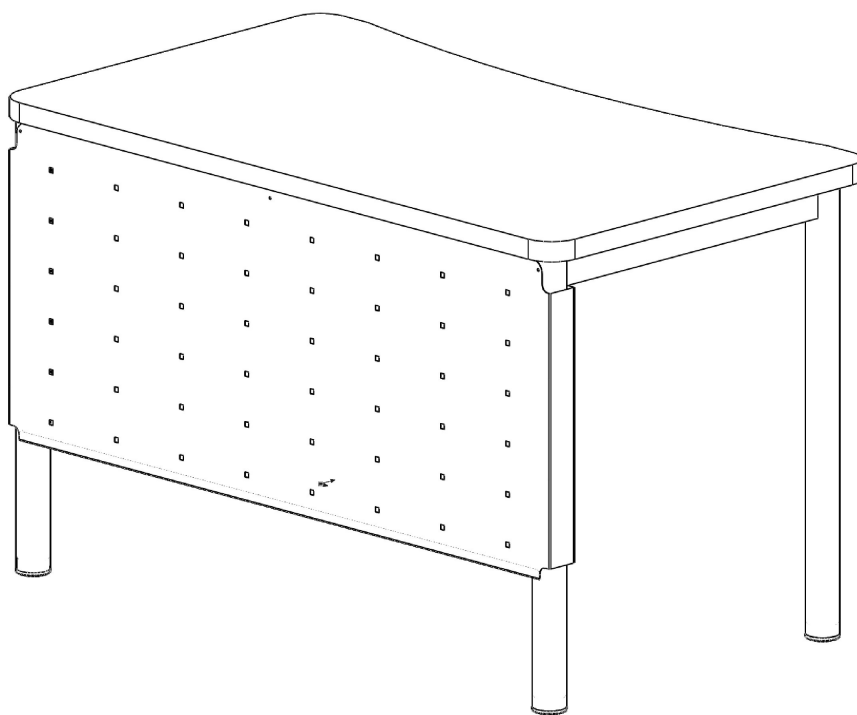

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стол медицинский для врача (далее по тексту — стол) предназначен для организации рабочего места специалиста в кабинете общественного учреждения, а также для использования в бытовых условиях.

1.2. Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры столов указаны в таблице 1.

Таблица 1 .

Наименование	МСК-5602.М	МСК-5602.М.01
Габаритные размеры, ±5мм		
длина	1200	1400
ширина	700	700
высота	750	750
Масса, не более, кг	25	30

2.2 Характеристики:

2.2.1 Столы изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, столешницы МДФ и листового металла.

2.2.2 Номинальная распределенная нагрузочная способность столов не менее 80 кг.

2.2.3 Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.2.4 Поверхность столов устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки столов соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	МСК-5602.М	МСК-5602.М.01
	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
Каркас- столешница	1	1
Металлический экран	1	1
Саморез по металлу 4,2x13 со сверлом	9	9
Ножка	4	4
Болт М10x45 с квадратным подголовком	4	4
Гайка М10	4	4
Шайба пружинная 10	4	4
Заглушка М50	4	4
Инструкция по сборке	1	1

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Столы представляют собой сборно-разборную конструкцию.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия .

## 6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Стол имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

## 8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Стол в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский для врача СМВ- «МСК» \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_ (Хабибуллин Р.Р)

---

## 11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие техники \_\_\_\_\_

наименование и тип изделия

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## Инструкция по сборке столов МСК - 5602.М, МСК - 5602.М.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.
3. Установить экран. Прикрепить его саморезами по металлу к ножкам.



Общество с ограниченной ответственностью «Медстальконструкция»  
450024, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1  
тел. (347)292-26-00

Адрес электронной почты: [megi@megi.ru](mailto:megi@megi.ru), Сайт: [megi.ru](http://megi.ru)

