

Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант»Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942312.010РЭ**Введение**

Настоящий документ предназначен для ознакомления и обеспечения правильной эксплуатации комплекта держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» (далее по тексту – комплект держателей).

1. Назначение

1.1. Комплект держателей предназначен для подвешивания флаконов, бутылок и пакетов с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами, к элементам интерьера (консоли автомобиля, каркаса тележки, спинки кровати и т.д.) при проведении инфузионной терапии.

2. Область применения

2.1. Автомобили скорой медицинской помощи, стационары, палаты интенсивной терапии, полевые условия, на дому.

3. Основные технические характеристики

- 3.1. Габаритные размеры в чехле, не более – 120x170x40 мм.
- 3.2. Масса в чехле, не более – 0,1 кг.
- 3.3. Максимальная нагрузка на держатель не должна превышать 1,5 кг.
- 3.4. Средний срок службы – не менее 3 лет.
- 3.5. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -25 до +40°С
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при темп. + 25 °С.

4. Комплект поставки

- Держатель инфузионных флаконов 200 мл. (малый) – 1 шт.
- Держатель инфузионных флаконов 400 мл. (большой) – 1 шт.
- Кронштейн – 2 шт.
- Чехол комплекта держателей ЧДФ-01 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. Устройство и принцип работы

5.1. Комплект держателей состоит из двух металлических кронштейнов (1), к одному концу, которых подвешивается флакон, а второй их конец крепится к элементу интерьера, и двух тканевых держателей на 200 и 400 мл (2), которые одеваются на флакон и с их помощью, флакон крепится к кронштейну.

5.2. Держатели представляют собой 2 поперечных кольца с липучками для фиксации флакона. Для удобства при использовании малый держатель выполнен в синем цвете, большой – в черном. Держатель с флаконом подвешивается к кронштейну за сплошную продольную стропу.

5.3. Пластиковые флаконы и пакеты с лекарственными средствами, имеющие на торце петлю с отверстием для подвешивания, могут подвешиваться без использования держателей флаконов, непосредственно к кронштейну.

5.4. Для удобства переноски и хранения комплект укладывается в чехол.

5.5. Устройство комплекта держателей представлено на рис. 1.

Ver.003

6. Порядок работы.

- 6.1. Извлеките элементы держателя из чехла.
 - 6.2. Выберите способ подвеса флакона.
 - 6.3. Наденьте на флакон держатель нужного размера и прикрепите держатель с флаконом к кронштейну.
- Если у флакона есть петля с отверстием для подвешивания, не надевайте на него держатель, а с помощью этой петли подвесьте флакон к кронштейну.
- 6.4. Прикрепите кронштейн с флаконом к поверхности интерьера, обеспечивающей необходимую высоту подвеса флакона.
 - 6.5. В случае загрязнения чистку и дезинфекцию производить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос» (по МУ 287-113).

ВНИМАНИЕ!!! Обработка спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается.

6.6. После завершения работы с комплектом держателей уберите его обратно в чехол.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование комплекта держателей может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2. Комплекты держателей могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 до + 40 °С.

8. Указания по утилизации

8.1. Комплект держателей относится к медицинским отходам класса «А». Он утилизируется стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует исправность комплекта держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» в течение 6 мес. со дня продажи.

9.2. Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия, а также нарушением условий настоящего РЭ.

10. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5 , эт.2, пом.1, ком.296-318.

Телефон: 8 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru

11. Свидетельство о приёмке

11.1. Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» (арт. _____) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Номер партии:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

**Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант»**Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942312.010РЭ**Введение**

Настоящий документ предназначен для ознакомления и обеспечения правильной эксплуатации комплекта держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» (далее по тексту – комплект держателей).

1. Назначение

1.1. Комплект держателей предназначен для подвешивания флаконов, бутылок и пакетов с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами, к элементам интерьера (консоли автомобиля, каркаса тележки, спинки кровати и т.д.) при проведении инфузионной терапии.

2. Область применения

2.1. Автомобили скорой медицинской помощи, стационары, палаты интенсивной терапии, полевые условия, на дому.

3. Основные технические характеристики

- 3.1. Габаритные размеры в чехле, не более – 120x170x40 мм.
- 3.2. Масса в чехле, не более – 0,1 кг.
- 3.3. Максимальная нагрузка на держатель не должна превышать 1,5 кг.
- 3.4. Средний срок службы – не менее 3 лет.
- 3.5. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -25 до +40°С
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при темп. + 25 °С.

4. Комплект поставки

- Держатель инфузионных флаконов 200 мл. (малый) – 1 шт.
- Держатель инфузионных флаконов 400 мл. (большой) – 1 шт.
- Кронштейн – 2 шт.
- Чехол комплекта держателей ЧДФ-01 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. Устройство и принцип работы

5.1. Комплект держателей состоит из двух металлических кронштейнов (1), к одному концу, которых подвешивается флакон, а второй их конец крепится к элементу интерьера, и двух тканевых держателей на 200 и 400 мл (2), которые одеваются на флакон и с их помощью, флакон крепится к кронштейну.

5.2. Держатели представляют собой 2 поперечных кольца с липучками для фиксации флакона. Для удобства при использовании малый держатель выполнен в синем цвете, большой – в черном. Держатель с флаконом подвешивается к кронштейну за сплошную продольную стропу.

5.3. Пластиковые флаконы и пакеты с лекарственными средствами, имеющие на торце петлю с отверстием для подвешивания, могут подвешиваться без использования держателей флаконов, непосредственно к кронштейну.

5.4. Для удобства переноски и хранения комплект укладывается в чехол.

5.5. Устройство комплекта держателей представлено на рис. 1.

Ver.003

6. Порядок работы.

- 6.1. Извлеките элементы держателя из чехла.
 - 6.2. Выберите способ подвеса флакона.
 - 6.3. Наденьте на флакон держатель нужного размера и прикрепите держатель с флаконом к кронштейну.
- Если у флакона есть петля с отверстием для подвешивания, не надевайте на него держатель, а с помощью этой петли подвесьте флакон к кронштейну.
- 6.4. Прикрепите кронштейн с флаконом к поверхности интерьера, обеспечивающей необходимую высоту подвеса флакона.
 - 6.5. В случае загрязнения чистку и дезинфекцию производить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос» (по МУ 287-113).

ВНИМАНИЕ!!! Обработка спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается.

6.6. После завершения работы с комплектом держателей уберите его обратно в чехол.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование комплекта держателей может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2. Комплекты держателей могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 до + 40 °С.

8. Указания по утилизации

8.1. Комплект держателей относится к медицинским отходам класса «А». Он утилизируется стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует исправность комплекта держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» в течение 6 мес. со дня продажи.

9.2. Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия, а также нарушением условий настоящего РЭ.

10. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5 , эт.2, пом.1, ком.296-318.

Телефон: 8 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru

11. Свидетельство о приёмке:

11.1. Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант» (арт. 617) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Номер партии:

Дата продажи:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

