

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ПАЛАТУ ПИЩИ И
СБОРА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ ТПП-1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
тЦДЗ.531.002 ПС**



Уважаемый Покупатель!
 Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
 Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,
 рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт)
 перед эксплуатацией.
 Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 (в дальнейшем - тележка) предназначена для облегчения подачи пищи для лежачих больных и повышения общей культуры внутрибольничного обслуживания, больных в лечебных учреждениях. Тележку изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2. по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9451-056-07614107-2009.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Габаритные размеры тележки:	
- длина	980 ± 25 мм
- ширина	680 ± 20 мм
- высота	905 ± 20 мм
Габаритные размеры панелей:	
- длина	855 ± 3 мм
- ширина	555 ± 3 мм
- глубина	30 ± 5 мм
Масса	24 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	150 ± 1 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с нагрузкой, не более	12 кг
Усилие необходимое для включения тормоза, не более	15 кг
Расстояние между панелями тележки	440 ± 5 мм
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

Акционерное общество
 "Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
 Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,
 тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
 E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды П.П.П.	1
Эксплуатационная документация		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт, этикетка)	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Тележка состоит основания 1, установленного на четыре самоориентирующихся колеса 5 и 6, двух скоб 2, одновременно выполняющих роль ручек двух съемных панелей 3, четырех бамперов 4.

Основание представляет собой сварную конструкцию из круглых труб, установленное на два колеса без тормоза 5 и два колеса с тормозом 6. На основании в рамки 7 устанавливаются панели 3.

4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить её от упаковочного материала (для облегчения снятия защитной плёнки рекомендуется обработать поверхность горячей водой, температурой не более 60°С), удалить антикоррозийную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, промыть горячей водой с моющими средствами и последующей просушкой.

4.3. Проверить комплектность.

4.4. При получении тележки в разобранном виде необходимо произвести сборку согласно рисунка 1.

4.5. Провести санитарную обработку тележки.

4.6. Для затормаживания колёс 6 необходимо нажать ногой панель 8 до соприкосновения с шиной колеса. Растормаживание колеса производить поворотом педали 8 в исходное положение.

4.7. Перед перемещением тележки растормозить колёса.

4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** эксплуатация тележки с неисправными тормозами.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 14.04.2016 года, основной государственный регистрационный номер 1025201635205

Юридический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение № 001
 Телефон: +7(831779)48042. Адрес электронной почты: dzmo@dzmo.ru

в лице Генерального директора Костров Андрей Владимирович

заявляет, что

Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 по ТУ 9451-056-07614107-2009

Серийный выпуск

изготавливает АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (АО "ДЗМО")

Адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», Здание 1, Помещение № 001
 Фактический адрес: 607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/2, участок №4, здание 4/1, участок №5, здание №5/1
 Код ОК 034-2014: 32.50.50.000, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8716 80 000 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 51084-97 Разд. 6, 8

Декларация принята на основании Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ ISO 13485:2017 (ISO 13485:2016) № PCK.RU.0001.P394224 с 30.11.2018 по 29.11.2021 года, выданного ОС ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (отсутствует аккредитация РОСС RU.31529-04ИКС0.001).

Регистрационный удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/06386 от 12.11.2015 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Дата принятия декларации: 11.12.2018
 Декларация о соответствии действительна до 10.12.2023

М.П.  А.В. Костров

Сведения о размещении декларации о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1107746918510.
 Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, офис 900
 Телефон +7(499)678-20-84, факс +7(499)678-20-84, адрес электронной почты info@mercis.ru
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 года, выдан Федеральной службой по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 11.12.2018, регистрационный номер декларации РОСС RU Д-РУ.АГ82.В.00708/18

М.П.  Ш.Н. Рулева



Рисунок 1

4.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: эксплуатация неисправной тележки, самостоятельный ремонт неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.

4.10. При эксплуатации тележки запрещается препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов во избежание получения травм и увечий.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных; смазке раз в год подшипников колес; промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.
- 5.2. Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес, работа тормозов.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали тележки должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б С.СТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).
- 6.2. Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды, ТПП-1 подвезднута в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9451-056-07614107-2009.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые произошли с момента приобретения товара.
9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9451-056-07614107-2009.
9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузка, транспортировке, сборке товара.
10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.





Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Тележка для доставки в палату пищи
и сбора грязной посуды

ТПП-1

Наименование изделия

Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

ООО "МедКомплекс "А.В.К."



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ПАЛАТУ ПИЩИ И СБОРА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ ТПП-1		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	12 месяцев	со дня продажи	

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя		
ФИО / Подпись		

